

# InBody 570 | Scheda Tecnica

Impedenziometro professionale, semplice da utilizzare, veloce e facile da installare.



Fornisce l'analisi della composizione corporea, della massa grassa e muscolare sia a livello complessivo sia a livello segmentale, il livello di grasso viscerale e l'indice di edema; è dotato di una guida vocale per una facile esecuzione del test. Presenta la scelta tra modalità individuale o professionale.

## CARATTERISTICHE

- Interfaccia semplice con voce guida
- Collegamento wifi
- Disponibile con stampante termica e Software Looking'Body dedicato
- Risultati per bambini con grafici di crescita



## PARAMETRI MISURATI

- Peso (kg)
- Massa grassa totale e segmentale (kg)
- Percentuale di grasso corporeo (% - kg)
- Massa magra priva di grasso totale e segmentale(kg)
- Massa muscolare scheletrica (kg)
- Acqua corporea totale (kg)
- Rapporto vita/fianchi
- Tasso metabolico basale (kcal)
- Indice di massa corporea (kg/m<sup>2</sup>)
- Valori di impedenza segmentale ( $\Omega$ )
- Proteine
- Minerali
- Punteggio InBody
- Indice di edema
- Livello di grasso viscerale
- Grafici e punteggio crescita per bambini

## SPECIFICHE TECNICHE

Misure: 522 (W) x 893 (L) x 1113 (H): mm  
Peso: 24 kg  
Frequenze: 5 kHz, 50 kHz, 500 kHz  
Display: 800 x 480 TFT LCD  
Portata peso: 10 - 250 kg  
Portata altezza: 95 - 220 cm  
Intervallo età: 3 - 99 anni

# InBody 570 | Scheda dei risultati

## InBody

ID 150216-2	Altezza 174cm	Età 51	Genere Maschio	Data Test / Ora 2015.02.16. 16:03
----------------	------------------	-----------	-------------------	--------------------------------------

### Analisi della Composizione Corporea

	Valore	Acqua Corporea Totale	Massa Magra	Massa Magra	Peso
Acqua Corporea Totale (L)	48,4 (37,4-45,8)	48,4	62,3 (48,1-58,7)	66,2 (51,0-62,3)	91,1 (56,6-76,6)
Proteine (kg)	13,1 (10,1-12,3)				
Minerali (kg)	4,70 (3,46-4,23)				
Massa Grassa del Corpo (kg)	24,9 (8,0-16,0)				

### Analisi Muscolo - Grasso

	Sotto	Normale	Sopra
Peso (kg)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %	91,1	
Massa del Muscolo Scheletrico (kg)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	37,5	
Massa Grassa del Corpo (kg)	40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 %	24,9	

### Analisi dell'obesità

	Sotto	Normale	Sopra
IMC (kg/m <sup>2</sup> )	10,0 15,0 18,5 22,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0	30,1	
Percentuale di Grasso Corporeo (%)	0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0	27,3	

### Analisi Massa Magra Segmentale

	Sotto	Normale	Sopra
Braccio Destro (kg) (%)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %	3,68 105,9	
Braccio Sinistro (kg) (%)	55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 205 %	3,62 104,0	
Tronco (kg) (%)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	28,2 101,8	
Gamba Destra (kg) (%)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	10,43 107,8	
Gamba Sinistra (kg) (%)	70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 %	10,45 108,3	

### Analisi del Rapporto AEC

	Sotto	Normale	Sopra
Rapporto AEC	0,320 0,340 0,360 0,380 0,400 0,410 0,420 0,430 0,440 0,450	0,375	

### Storia della Composizione Corporea

	15.02.16. 15:55	15.02.16. 16:03
Peso (kg)	90,1	91,1
Massa del Muscolo Scheletrico (kg)	37,3	37,5
Percentuale di Grasso Corporeo (%)	26,9	27,3
Rapporto AEC	0,376	0,375

Recente  Totale

Ver. LookInBody120. 1.0.3.2 Copyright © 1006 - by Biospace Co., Ltd. All rights reserved. BR-Italy-03-G-140203

### Punteggio InBody

76 / 100 Punteggio

\* Punteggio totale che rispecchia la valutazione della composizione del corpo. Una persona muscolosa può ottenere un punteggio di oltre 100 punti.

### Controllo del Peso

Peso Target 77,9 kg  
 Controllo del Peso -13,2 kg  
 Controllo del Grasso -13,2 kg  
 Controllo del Muscolo 0,0 kg

### Valutazione Obesità

IMC  Normale  Sotto  Leggermente sopra  Sopra

PGC  Normale  Leggermente sopra  Sopra

### Valutazione Equilibrio Corporeo

Superiore  Bilanciato  Leggermente sbilanciato  Estremamente sbilanciato  
 Inferiore  Bilanciato  Leggermente sbilanciato  Estremamente sbilanciato  
 Superiore-Inferiore  Bilanciato  Leggermente sbilanciato  Estremamente sbilanciato

### Analisi Massa Grassa Segmentale

▼ | — | ▲

Braccio Destro (1,6 kg) 273,2%  
 Braccio Sinistro (1,7 kg) 278,2%  
 Tronco (13,0 kg) 308,6%  
 Gamba Destra (3,7 kg) 213,1%  
 Gamba Sinistra (3,6 kg) 210,8%

### Parametri di Ricerca

Acqua Intracellulare 30,3 L ( 23,2-28,4 )  
 Acqua Extracellulare 18,1 L ( 14,2-17,4 )  
 Tasso Metabolico Basale 1800 kcal  
 Relazione Cintura Fianchi 0,89 ( 0,80-0,90 )  
 Livello Grasso Viscerale 9 ( 1-9 )  
 Grado di obesità 137 % ( 90-110 )  
 Contenuto Minerale Osseo 3,86 kg ( 2,85-3,49 )  
 Massa Cellulare Corporea 43,4 kg ( 33,3-40,7 )  
 Circonferenza braccio 35,1 cm  
 Circonferenza Muscolare del Braccio 30,3 cm

### Codice QR per l'Interpretazione dei Risultati

Eseguire la scansione del codice QR per leggere l'interpretazione dei risultati più nel dettaglio.

### Impedenza

	BD	BS	TR	GD	GS
Z <sub>50Hz</sub>	287,0	292,4	23,9	214,9	208,8
50 kHz	250,8	257,2	20,2	185,5	180,9
500 kHz	214,3	220,1	15,6	157,8	154,6

Foglio risultati composizione corporea, LookinBody120