

CONFIGURAZIONE DEL SERVER SMTP DI GMAIL PER LOOKIN'BODY120

Effettuare l'accesso al proprio account Gmail.

Configurarlo come segue:

SMTP Host: **smtp.gmail.com**

SMTP Port: **587**

SSL Protocol: **OFF**

TLS Protocol: **ON**

SMTP Username: nome utente Gmail

SMTP Password: password Gmail

Verificare che la porta 587 non sia bloccata dal firewall.

Ricezione POP3

POP3 Host: **pop.gmail.com**


POP3 Port: **995**

TLS Protocol: **ON**

POP3 Username: nome utente Gmail

POP3 Password: password Gmail

Avviate il programma Lookin'Body120 e cliccate su "Impostazioni".

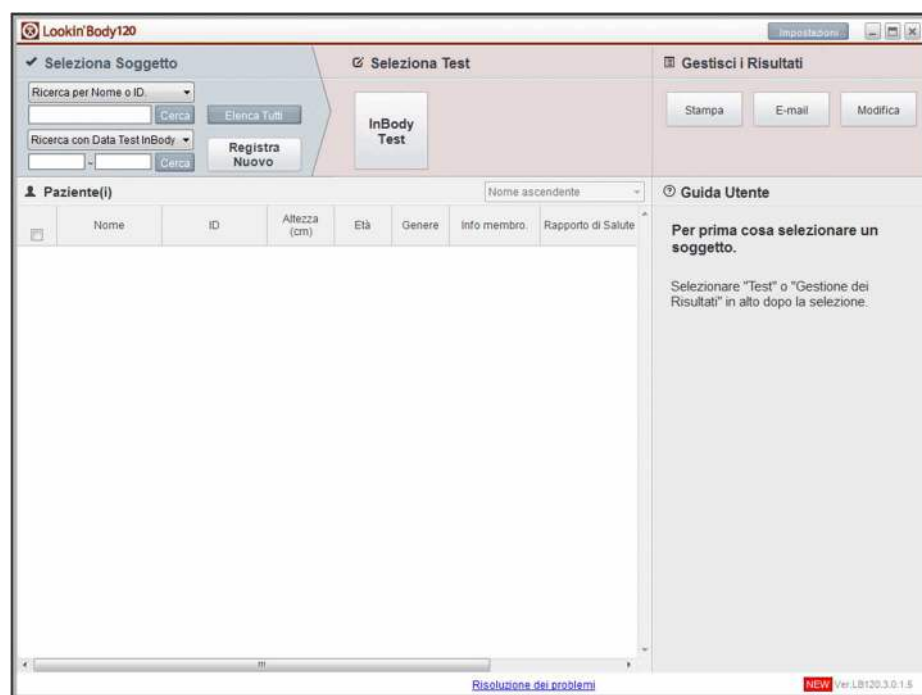

Selezionate l'opzione "05. Opzioni e-mail".

Impostazioni

Normale

- 01. Paese/Lingua/Unità/Formato Data/Password
- 02. Stampante
- 03. Tipi di Risultati/Tipi di Carta/Opzioni di Stampa/Opzioni Automatiche di Stampa
- 04. Personalizzazione del foglio dei risultati
- 05. Opzioni e-mail
- 06. Modificare le informazioni Paziente (storia clinica / gruppo)
- 07. Condivisione Dati
- 08. Blocco Automatico
- 09. Informazioni Assistenza Clienti
- 10. Informazioni sul Programma e sul Computer/Aggiornamento dello Storico

Test InBody

- 01. Modello InBody
- 02. Inviare i Risultati InBody al Sito Web
- 03. Output/Interpretazioni dei Risultati
- 04. Intervallo Normale
- 05. Esportazione Dati alla Cartella Clinica Elettronica (CCE)
- 06. N/A
- 07. N/A

Compilate i campi come indicato dalla schermata sottostante.

05. Opzioni e-mail

Imposta un account per inviare le e-mail.

1. Selezionare l'account.

☐ **Account InBody:** Inviare un'e-mail utilizzando l'account fornito da InBody:
noreply@inbody.co.kr è l'e-mail preimpostata indicata ai pazienti e non può essere modificata.

☒ **Acc. utente:** Inviare un'e-mail utilizzando il proprio account. Le informazioni qui sotto sono necessarie.

2. Inserire le informazioni necessarie.

• **Host**
* Esempio : smtp.gmail.com

• **Utente**
* Esempio : LookinBody120@gmail.com
* Questo indirizzo e-mail verrà indicato ai tuoi pazienti.

• **Nome**
* Esempio : InBody
* Questo nome utente verrà indicato ai tuoi pazienti.

• **Password**

• **Porta**
* Esempio : 587

• **Connessione sicura** ☐ Utilizza ☒ Non usare

Salva

Premete il tasto “Salva” e ritornate alla schermata principale del programma.

Ora il sistema è in grado di inviare correttamente le e-mail.