

Collegarsi al sito InBody cliccando sul seguente link:

<http://www.inbody.com/global/>

Selezionare il menu **“Support”**

Dal menu a tendina selezionare la voce **“Data Management Program”**


Dal nuovo menu a tendina che viene visualizzato selezionare la voce **“Lookin’Body Basic”**


Premere il tasto **Search**

Cliccare sul link **Lookin’Body Basic Installation Files**

Scaricare entrambi i file:

| Title | Date |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Lookin'Body Basic Installation file (720,520,230,J10, 370, S10) | 26-03-2015 |

 [Download - Lookin'Body Basic.exe](#)

 [Download - Lookin'BodyBasic update.exe](#)

salvandoli entrambi sul desktop del PC.

Installare entrambi i programmi nell’ordine in cui sono visualizzati in foto.

Per installare i file bisogna disporre del codice riportato sul CD originale;

in alternativa utilizzate: 6QY1ZSZ-UZZQ5Z-EZGZPQ2HJ1QR.

Durante l’installazione seguire le istruzioni che vengono fornite.