

BSM 170/170B

Manuale d'uso



Si prega di notare le informazioni sottostanti prima di procedere alla lettura del manuale.

 **Attenzione**

Non attenersi con attenzione alle avvertenze e alle norme di sicurezza può portare a lesioni gravi o mortali.

 **Cautela**

Non attenersi alle precauzioni ed alle norme di sicurezza può portare a lesioni o danni materiali.

InBody

Per qualunque problema con BSM170/170B o domande cliniche, contattarci come segue:

InBody Co., Ltd. [HEAD OFFICE]

InBody Bldg., 54, Nonhyeon-ro 2-gil, Gangnam-gu, Seoul 135-960 KOREA

TEL: +82-2-501-3939 FAX: +82-2-578-2716

Website: <http://www.inbody.com>

E-mail: info@inbody.com

Il presente manuale d'uso non può essere copiato, tradotto o trasformato in un diverso formato multimediale, senza il consenso scritto di InBody Co., Ltd, in conformità alle leggi sul copyright. Il presente manuale ed il prodotto a cui si riferisce possono contenere errori di battitura o imprecisioni tecniche, che possono essere corrette senza previo avviso agli utenti. InBody non è responsabile in caso di danni causati dal mancato rispetto di quanto specificato nel presente manuale.

Visitate il nostro sito <http://www.inbody.com> per visualizzare e scaricare ulteriori informazioni sulle funzioni di BSM170/170B, la spiegazione dei risultati ed altro. InBody Co., Ltd si riserva il diritto di modificare le dimensioni o l'aspetto esteriore del prodotto al fine di migliorarne la qualità, senza previo consenso del cliente.

Informazioni servizio clienti

InBody [USA]

13850 Cerritos Corporate Dr., Unit C, Cerritos, CA 90703, USA

TEL: +1-323-932-6503 FAX: +1-323-952-5009 Website: <http://www.inbodyusa.com> E-mail: info@inbodyusa.com

InBody Japan Inc. [JAPAN]

Second Floor Ayabe Bldg., 2-17-3 Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo JAPAN

TEL: +81-03-5298-7667 FAX: +81-03-5298-7668 Website: <http://www.inbody.co.jp> E-mail: inbody@inbody.co.jp

EU Representative. [EUROPE]

DongBang Acuprime. 1 Forrest Units, Hennock Road East, Marsh Barton, Exeter EX2 8RU, U.K

TEL: +44-1392-829500 FAX: +44-1392-823232 Website: <http://www.inbody.com> E-mail: info@acuprime.com

Biospace China. [CHINA]

904, Xing Di Plaza, No. 1698 Yishan Road, Shanghai, 201103, CHINA

TEL: +86-21-64439738, 9739, 9705 FAX: +86-21-64439706 Website: <http://www.biospacechina.com> E-mail: info@biospacechina.com

Australian Sponsor. [AUSTRALIA]

Emergo AUSTRALIA. Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

TEL: +61-2-9006-1662 FAX: +61-2-9006-1010 Website: <http://www.emergogroup.com> E-mail: Sponsor@emergogroup.com

BSM170/170B

Contenuto del Manuale d'uso

I. Installazione Statimetro

A. Componenti del prodotto	4
B. Ambiente operativo	5
C. Istruzioni di installazione	5
D. Impostazioni statimetro	12
E. Manutenzione	18

II. Misurazione altezza

A. Cautele per la misura	19
B. Istruzioni per la misura	20
C. Postura corretta	21

III. Trasporto e Stoccaggio

A. Istruzioni reimballaggio	22
B. Trasporto e ambiente di conservazione	22

IV. FAQ 23

V. Altro

A. Aspetto e funzioni	24
B. Simboli	26
C. Specifiche	27




I. Installazione Statimetro

A. Componenti del prodotto

Il BSM170/170B contiene i seguenti componenti. Si prega di accertarsi che tutti i componenti siano presenti

* Ispezionate ogni componente di BSM170/170B in caso di danni prima dell'installazione.

- 1 Pedana 1 EA
- 2 Stand (superiore) 1 EA
- 3 Stand (inferiore) 1 EA
- 4 Unità di misura 1 EA
- 5 Nastro di misura 1 EA
- 6 Viti per pedana 4 EA
- 7 Viti per stand 4 EA
- 8 Manuale d'uso 1 EA
- 9 Batterie AA 4 EA
- 10 Struttura test 1 EA

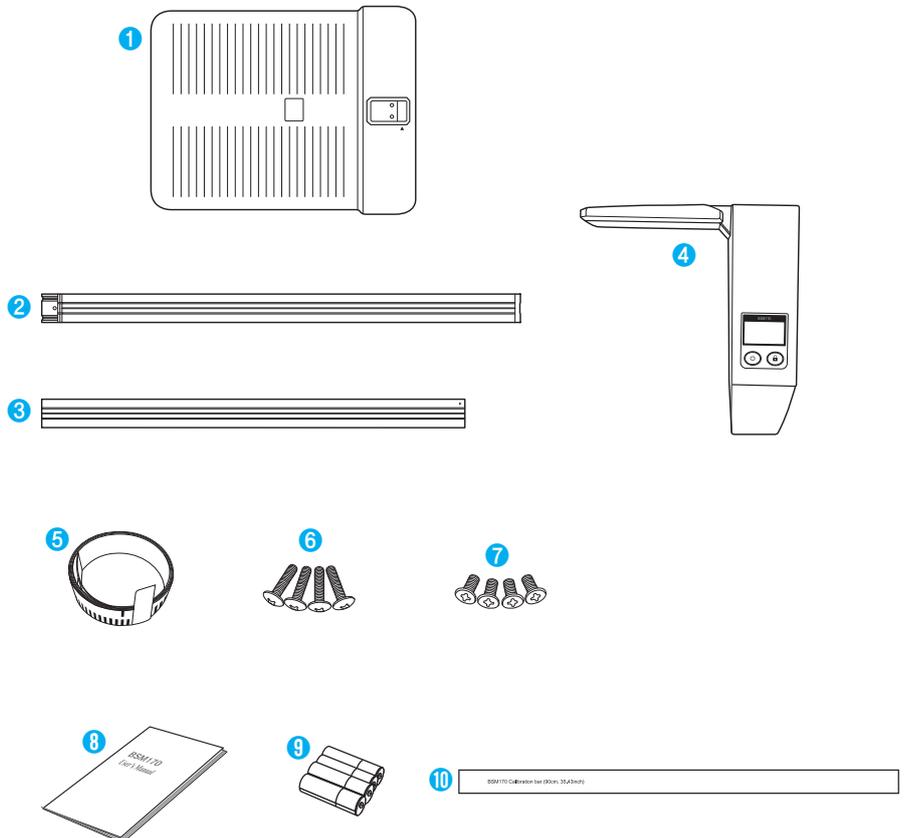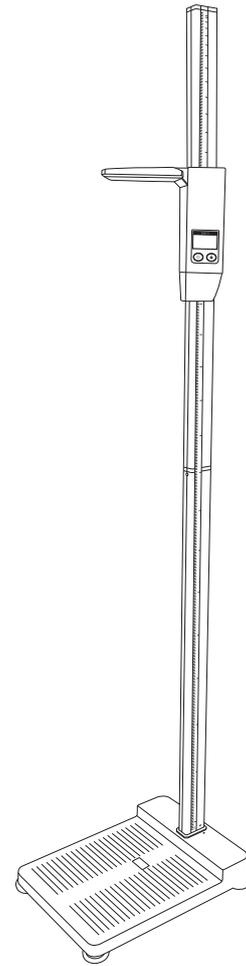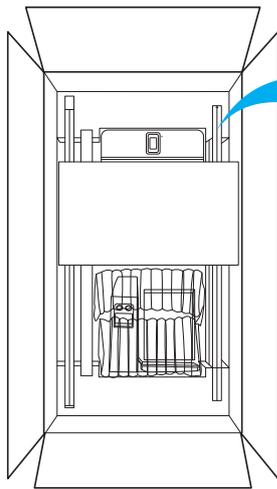

B. Ambiente operativo

Assicuratevi che l'ambiente sia adeguato all'installazione di BSM170/170B quest'apparecchiatura è designata per uso interno. Se installata all'esterno, i seguenti requisiti devono essere seguiti.

Intervallo temperatura	10 ~ 40°C (50 ~ 104°F)
Umidità relativa	30 ~ 75% RH
Pressione atmosferica	70 ~ 106kPa

! Attenzione


- Prima di installare BSM170/170B, verificare che il soffitto sia almeno 2.3m di altezza. La massima altezza di questo dispositivo è di 2.19m. Mantenere uno spazio di almeno 3cm tra il soffitto e la parte superiore del BSM170/170B.

C. Istruzioni di installazione


1. Dopo aver aperto la scatola del BSM170/170B, rimuovere il materiale di imballaggio ed estrarre tutti i componenti del prodotto.

! Attenzione

- Conservare il materiale di imballaggio fornito per reimballare in futuro il dispositivo. Altri rifiuti devono essere smaltiti in accordo con le leggi e regole vigenti.
 - Installare il BSM170/170B su una superficie piana e non vibrante. Installare il dispositivo su una superficie non piana potrebbe causare la caduta del paziente. Anche i risultati della misura potrebbero essere inaccurati.
 - Non pulire mai il BSM170/170B con spray liquido o detergente direttamente. Il dispositivo potrebbe corrodarsi e/o malfunzionare se il liquido o detergente penetra all'interno. Inoltre, il nastro di misura del BSM170/170B potrebbe essere danneggiato. Durante la pulizia del BSM170/170B, pulirlo leggermente con il panno.
2. Inserire lo "Stand (inferiore)" nella pedana, accertandosi che la freccia (▼) collocata in basso a destra dello "Stand (inferiore)" e la freccia (▲) collocata sulla pedana si guardino l'un l'altra.
 - * Durante l'inserimento nello "Stand (inferiore)", la parte senza buchi per le viti deve essere rivolta in basso.
 - * Lo "Stand (inferiore)" e la pedana sono disegnate per essere assemblate in un'unica direzione specifica. Forzare lo stand per essere inserito nella scorretta direzione potrebbe danneggiare il prodotto.

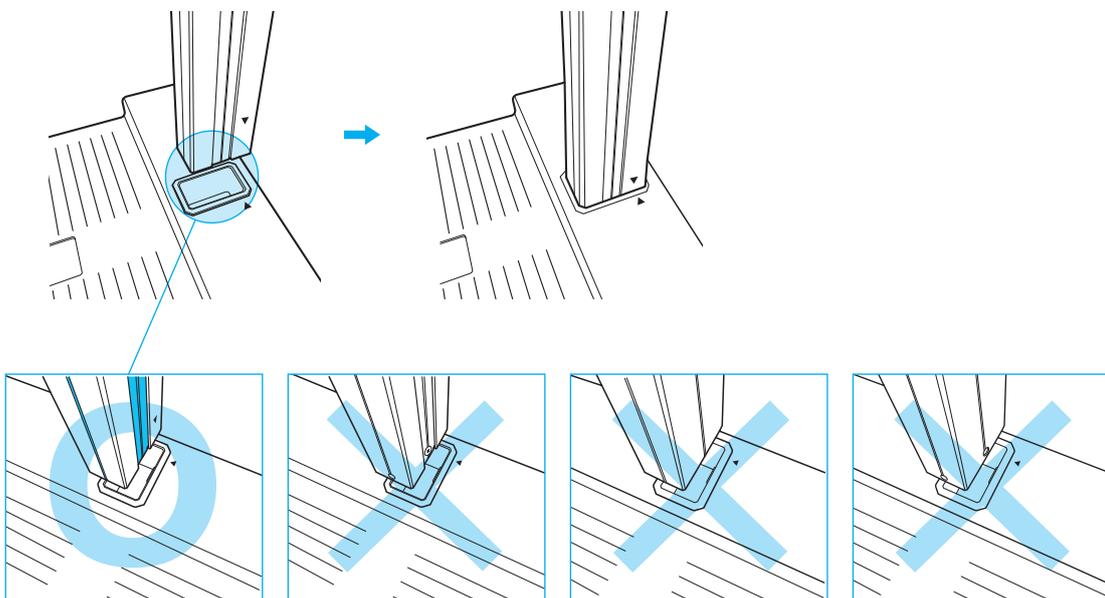


3. Tenere lo “Stand (inferiore)” in posizione per prevenire eventuali scorrimenti del buco di inserimento della piattaforma, sollevare il dispositivo sul lato verso il pavimento.

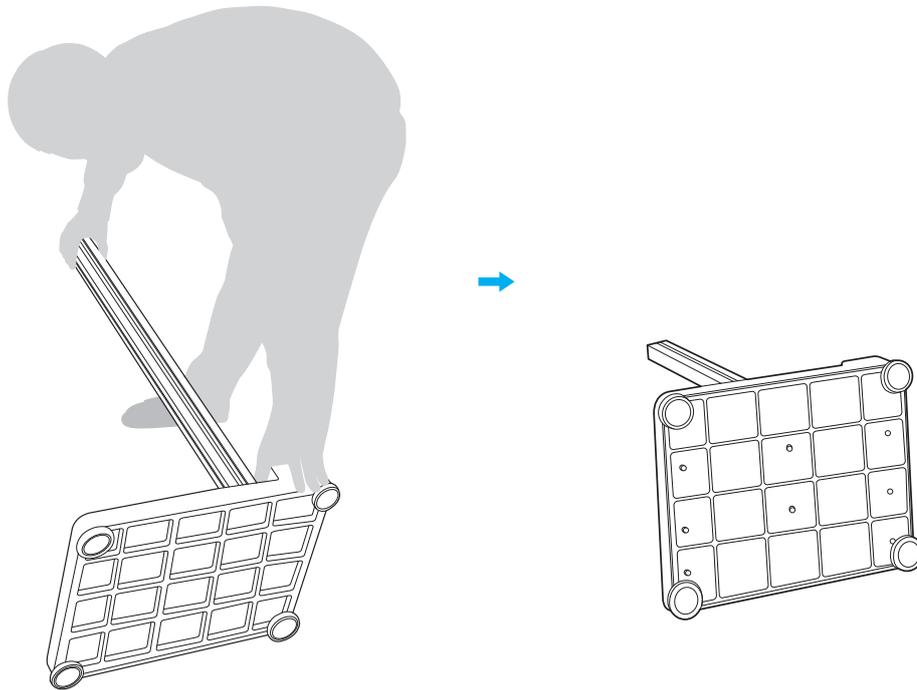


4. Avvitare ciascuna delle 4 viti di montaggio per la pedana nei buchi collocati sul lato opposto del buco di inserimento dello stand sulla pedana.

5. Stringere le viti di montaggio dello Stand avvitandole in senso orario con un cacciavite Phillips.

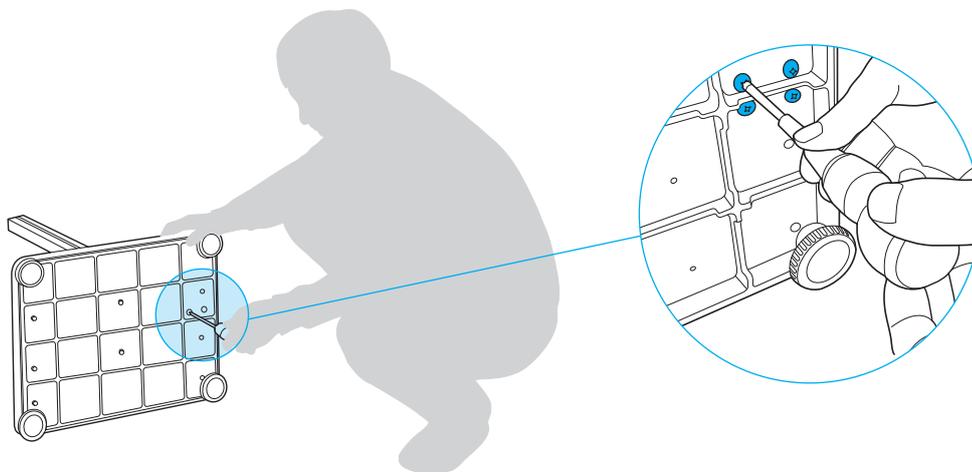


6. Dopo che tutte e 4 le viti sono state avvitate saldamente, riposizionare lo “Stand (inferiore)” e la pedana in una posizione dritta.
7. Inserire il terminale nero dello “Stand (superiore)” nello “Stand (inferiore)” come illustrato sotto.

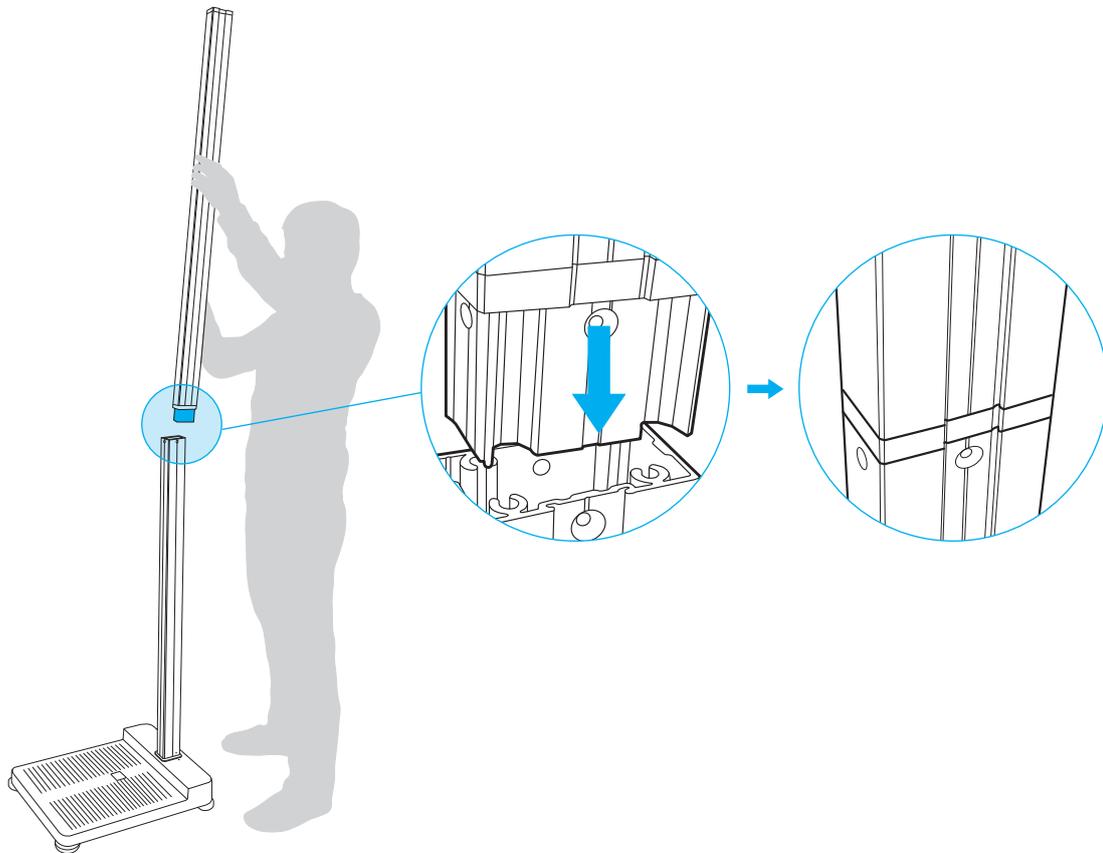

! Cautela

- Tenere lo “Stand (superiore)” il più verticale possibile così che non venga inserito in posizione obliqua.


8. Dopo aver inserito lo “Stand (superiore)” nello “Stand (inferiore)”, fissare i due stand insieme usando le viti di montaggio e il cacciavite Phillips.

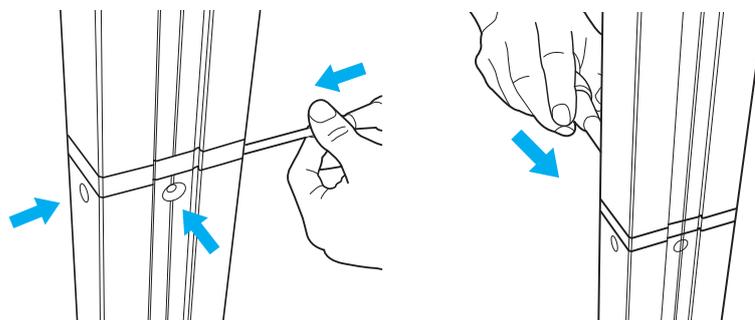

! Cautela

- Evitare di applicare eccessiva forza nell'avvitare le viti di montaggio.


9. Inserire il nastro di misura nello “Stand (superiore)” con la ↓ verso il basso. Fare riferimento alle illustrazioni sottostanti. Dopo che il nastro di misura è stato completamente inserito, rimuovere la pellicola attaccata al termine del nastro di misura per fissare il nastro allo stand.

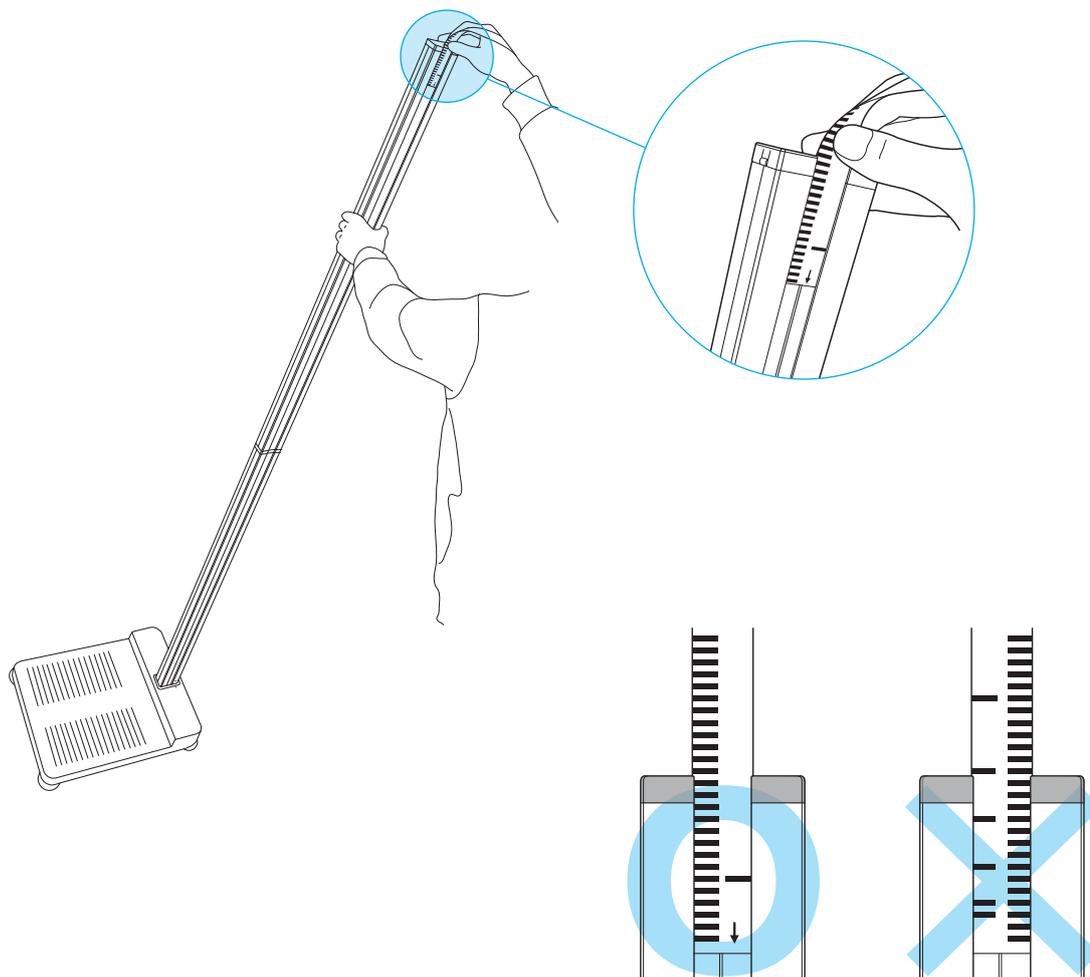

 **Cautela**

- Il nastro di misura deve essere inserito con la freccia ‘↓’ rivolta in basso.
- Una misura corretta non può essere presa se il nastro di misura è inserito al contrario.

10. Sollevare lo Stand in una posizione verticale ed inserire l'unità di misura nello stand come illustrato sotto.

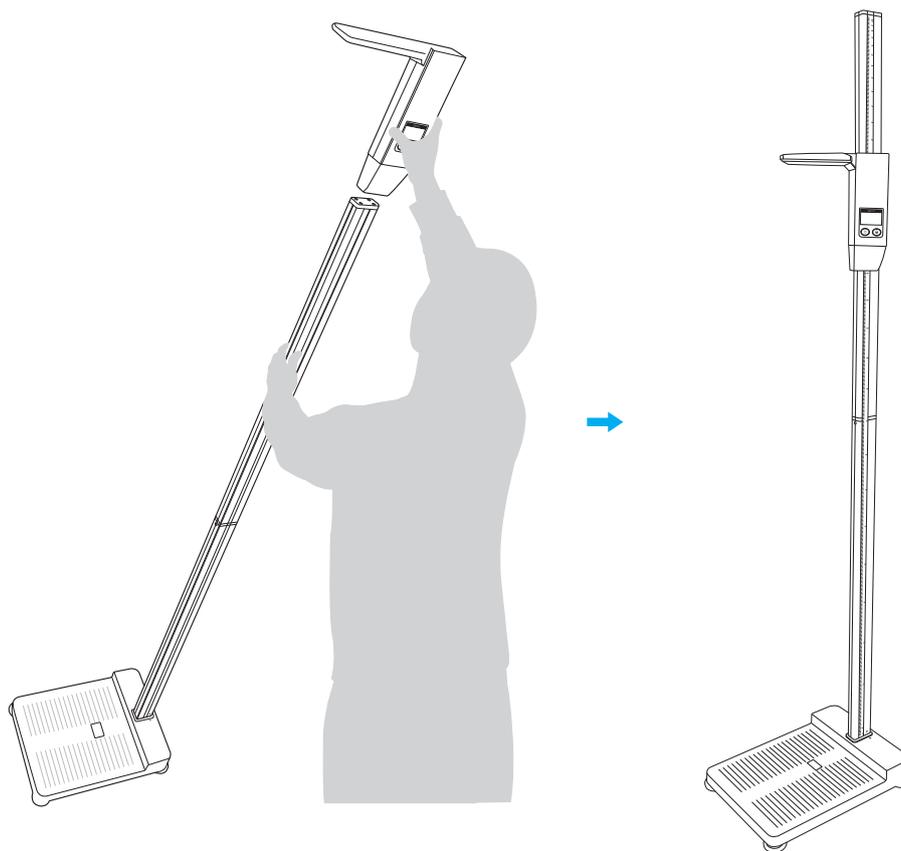

 **Cautela**

- Lo schermo LCD dell'unità di misura e il nastro di misura devono essere visibili dallo stesso lato.


11. Il BSM170/170B usa batterie come fonte di energia.

* Quando il tempo di standby termina, il dispositivo si spegne automaticamente.

❶ Tempo di standby del BSM170: 10 secondi.


❷ Tempo di standby del BSM170B: 2 minuti se non è connesso all'InBody, 10 secondi se è connesso all'InBody.

- 1) Aprire il coperchio delle batterie collocato sul lato destro dello schermo LCD.
- 2) Inserire le 4 batterie AA.
- 3) Coprire il vano batterie con il coperchio apposito.

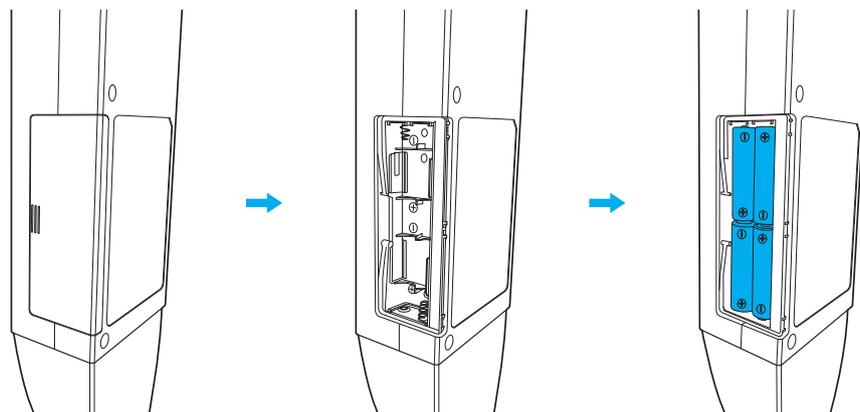

12. Dopo aver posizionato il BSM170/170B su di una superficie piana, se la pedana non è livellata, usare le viti di aggiustamento della pedana per regolare fino a completo livellamento.


* Livellare il dispositivo è necessario per una misura accurata dell'altezza.

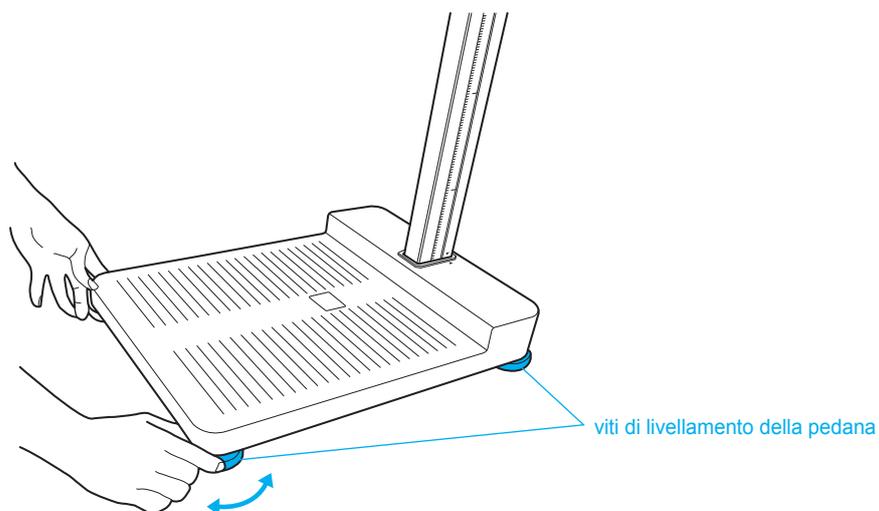

13. Durante le misurazioni con BSM170/170B, l'operatore deve muovere l'unità di misura su e giù manualmente. Di default, la vite di regolazione è stretta per evitare che l'unità di misura scorra liberamente. Se la vite è stretta troppo, regolare la vite a piacimento.


* Di default, la vite di regolazione è stretta per evitare che l'unità di misura scorra liberamente. Se la vite è stretta troppo, regolare la vite a piacimento.

* Se la vite è stretta troppo, l'unità di misura potrebbe non muoversi.

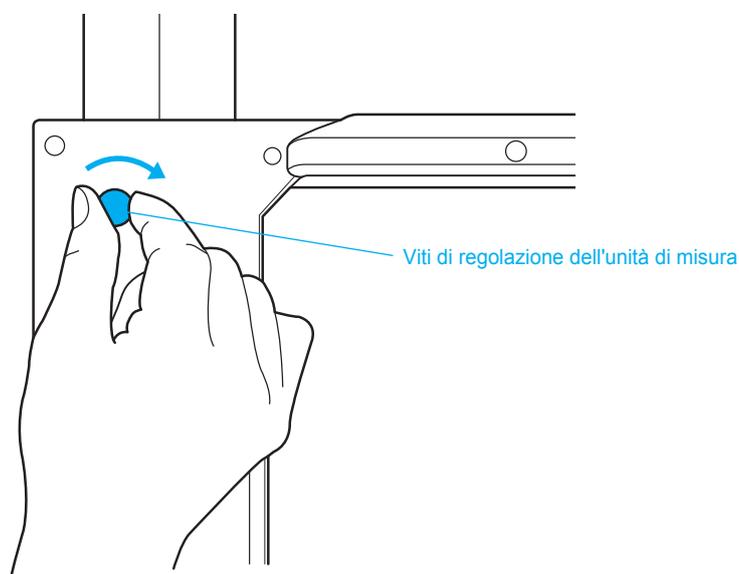

14. Accendere il BSM170/170B.

15. Muovere l'unità di misura su e giù fino a che la scritta 'Move' scompare. Il dispositivo entrerà in standby e lo schermo cambierà come mostrato sotto.

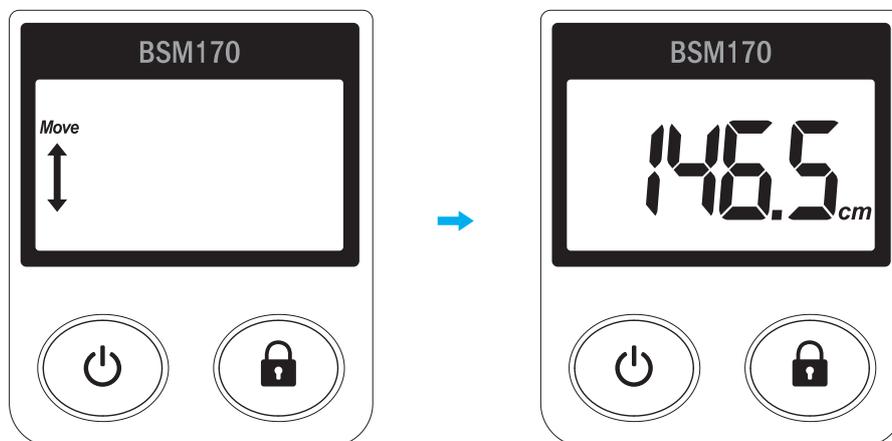

D. Impostazioni Statimetro

1. Impostazioni necessarie

1. Dopo l'accensione del BSM170/170B, tenere premuto  insieme al tasto  per almeno 3 secondi per accedere al menu impostazioni.



then press the

2. Nel menu impostazioni, impostare il tempo di attesa per la misurazione, suono, luminosità schermo, unità e offset.


- 1) Tempo di attesa per la misurazione:  questo tasto premuto dopo una misurazione è registrato.

Quando il valore a monitor si fissa resta sullo schermo LCD per questo tempo, anche se l'unità di blocco è spostata.


- a. Usare  per spostarsi su 'Hold' e premere poi  per selezionare.
- b. Usare  per impostare un tempo di attesa per il valore di altezza bloccato.

* Modalità: Si può sbloccare e bloccare il valore della misura premendo .

* Tempo: L'altezza misurata apparirà sullo schermo per un tempo impostato. Impostare il tempo di blocco tra 1 e 10 secondi.

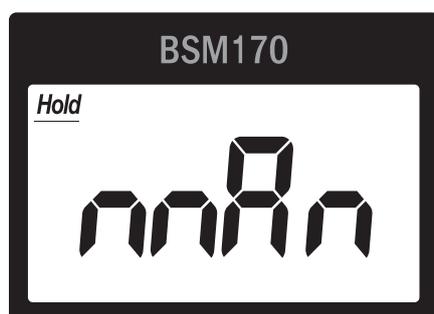

Modalità

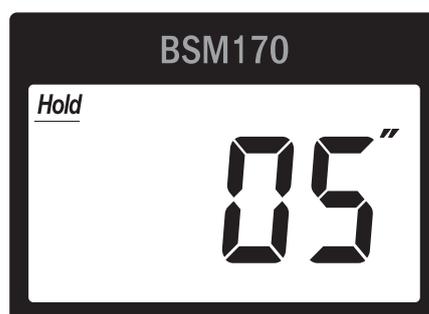

Tempo


- c. Salvare i cambiamenti con .

2) Suono: Abilitare o disabilitare il beep di avviso.

a. Usare  per spostarsi su 'Beep' e premere poi il tasto 

b. Usare  per accendere o spegnere i suoni di avviso.

* Il Beep può essere impostato come acceso o spento.

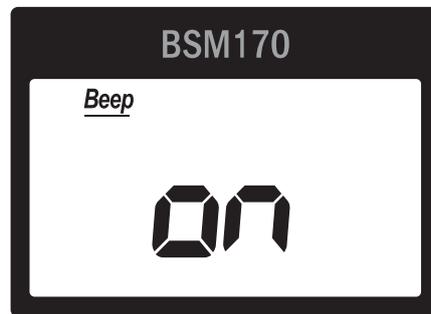

Impostazione Beep


c. Salvare le modifiche premendo 

3) Luminosità schermo: Luminosità dello schermo LCD

a. Usare  per spostarsi su 'Light' e premere poi il tasto 

b. Usare  per impostare la luminosità dello schermo più appropriata per l'ambiente di test.

* La luminosità dello schermo può essere impostata al 100%, 50% o spenta.

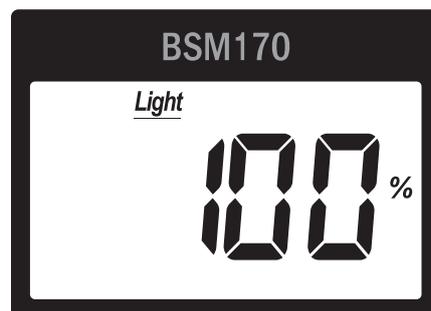

impostazione luminosità schermo


c. Salvare i cambiamenti con 

4) Unità: Unità di misura usata per la misura.

a. Usare  per spostarsi su 'Unit' e premere poi il tasto 

b. Usare  per impostare l'unità appropriata per il test.

* L'unità impostata può essere cm o feet e inches

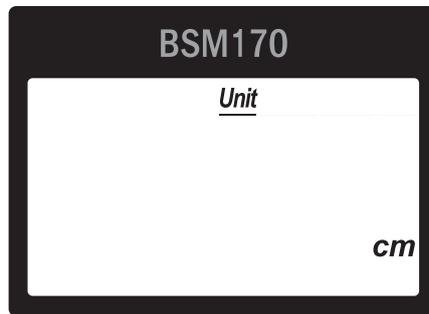

Impostazione unità

c. Salvare i cambiamenti con 


5) Offset: Impostare un valore di offset permette di regolare automaticamente il valore della misura.

a. Usare  per spostarsi su 'Offset' e premere poi il tasto 

b. Muovere l'unità di misura su e giù per impostare il valore di offset appropriato per il test.

* Il valore di offset può essere ± 99.9 cm.


* Per reimpostare il valore a 0.0, premere 

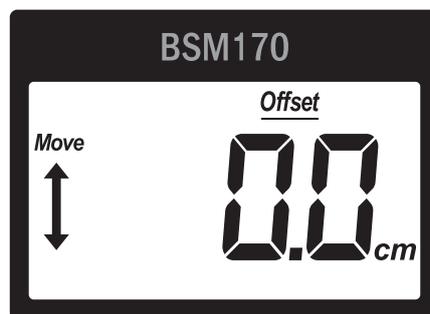

impostazione valore offset


c. Salvare i cambiamenti con 

6) Avvenuta la configurazione di BSM170/170B  premere il tasto per spostarsi su 'Exit' e premere poi . Il BSM170/170B è ora pronto per l'uso.

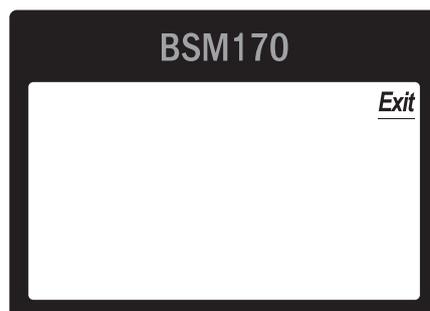

2. Impostazioni opzionali


1. Dopo aver acceso il BSM170/170B, tenere premuto  ed il tasto  sull'unità di misura contemporaneamente per almeno 3 secondi per accedere al menu impostazioni.

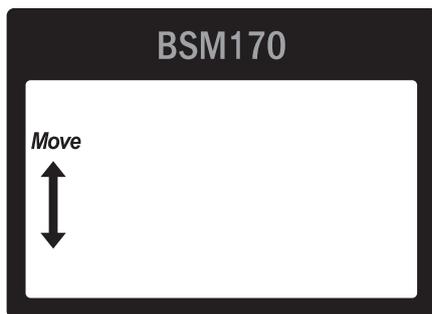


2. Nel menu impostazioni, è possibile calibrare il dispositivo o reimpostare le impostazioni iniziali.

1) Calibrazione: il dispositivo può essere calibrato per garantire valori corretti della misura.

- a. Alzare l'unità di misura fino all'estremità superiore dello stand come illustrato di seguito.

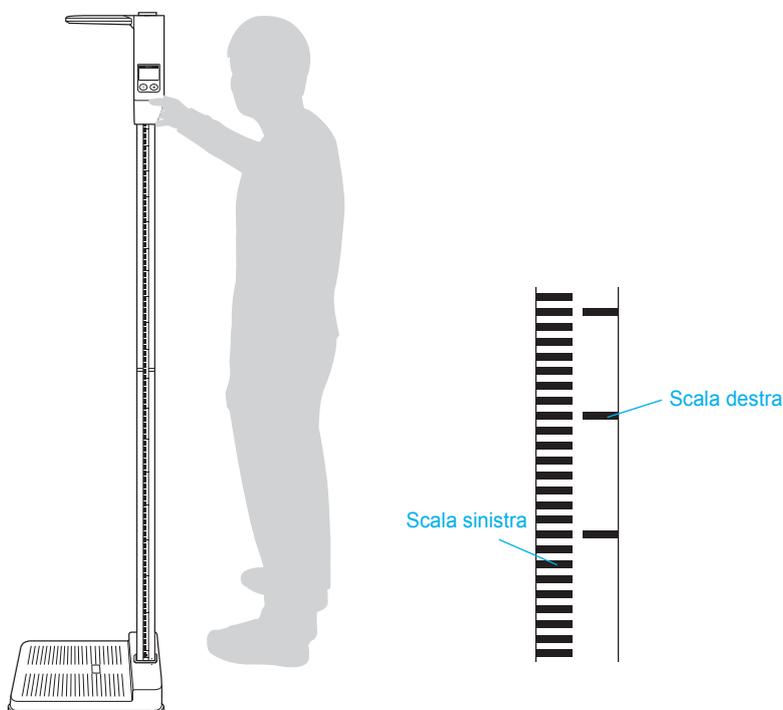


- b. Usare  per spostarsi su 'Cal.' e premere poi premere .

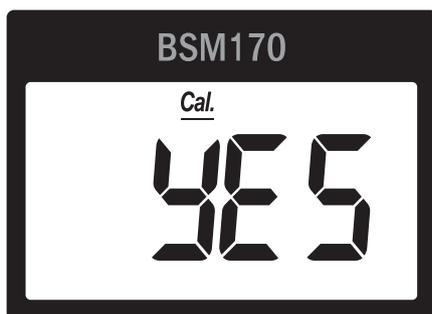


Impostazione calibrazione

- c. Usare  per spostarsi su 'Yes' e premere poi il tasto 
La calibrazione avrà inizio.

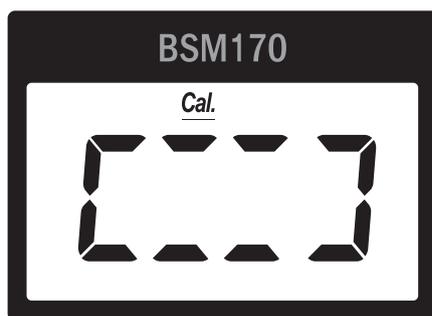


- d. Abbassare lentamente l'unità di misura fino al raggiungimento della parte inferiore della pedana e premere 


* L'unità di misura deve essere abbassata fino ad arrivare a contatto con la pedana.

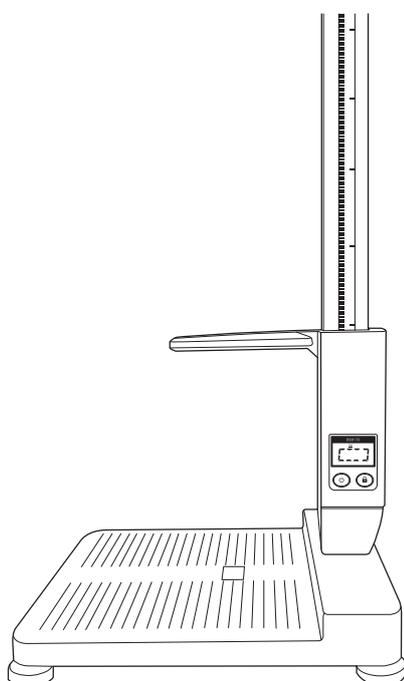

- e. Lo schermo LCD dovrebbe leggere 34.3cm.

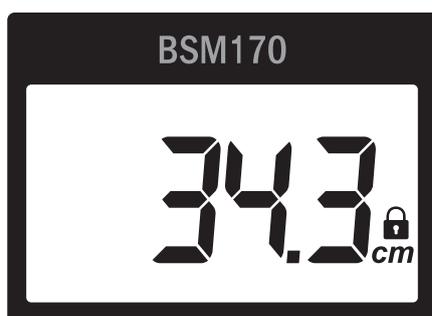


f. Usare  per spostarsi su 'Exit' e premere poi il tasto  Il BSM170/170B è ora pronto per l'uso.

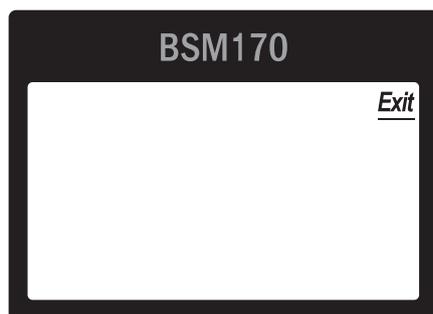


g. Posizionare lo strumento di prova fornito sul logo della pedana e abbassare l'unità di misura affinché tocchi la parte superiore dello strumento di prova come mostrato in figura.

- * Lo strumento di prova deve essere posizionato perpendicolarmente alla pedana .
- * Lo strumento di prova deve essere posizionato correttamente.

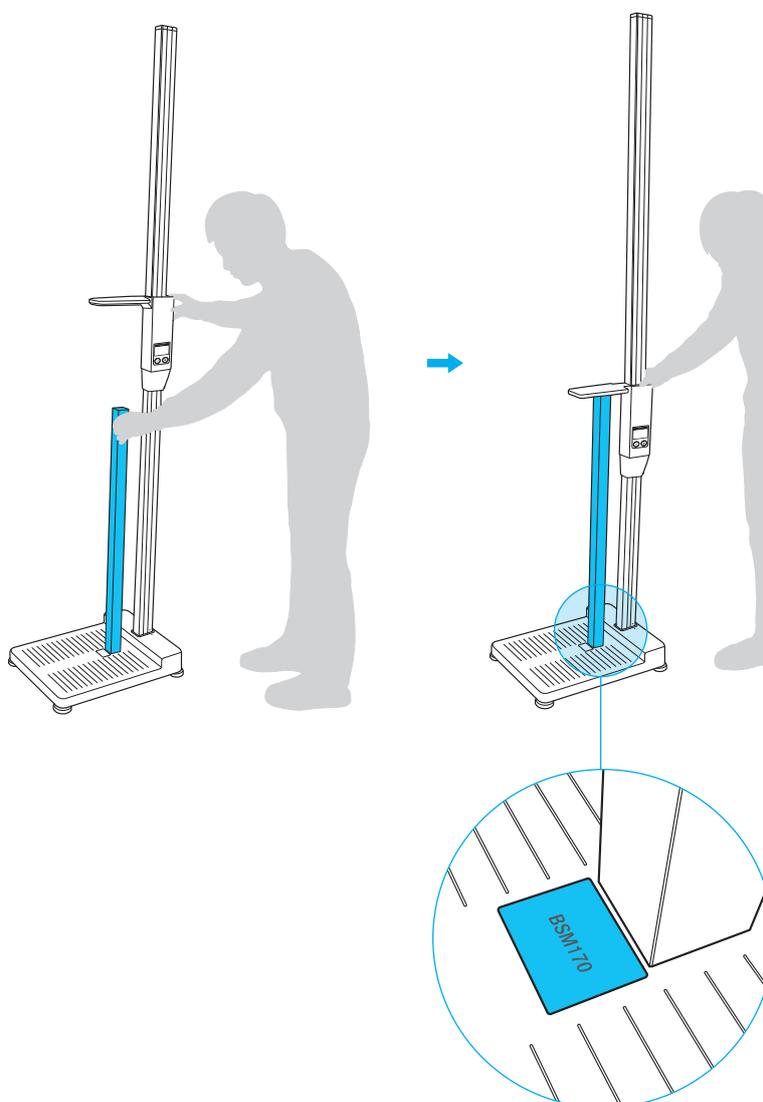

h. Verificare che il valore '88.9cm' compaia sullo schermo LCD dell'unità di misura.

* Se '88.9cm' non compare sullo schermo LCD (intervallo di errore: ± 0.1 cm), contattare InBody.

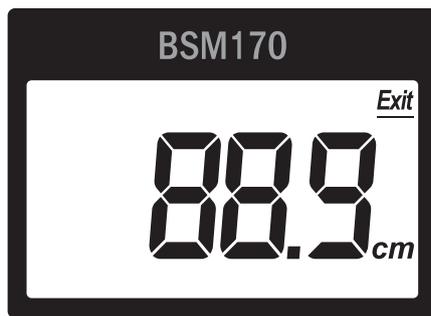


2) Reset: Reimposta tutte le impostazioni iniziali.

a. Usare  per spostarsi su 'Reset' e premere poi il tasto 

b. Usare  per spostarsi su 'Yes' e premere 

Tutte le impostazioni saranno resettate.

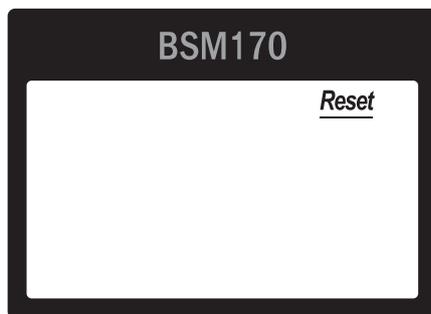

Reset

E. Manutenzione

Cautele

- Potrebbe non essere possibile eseguire misurazioni se il nastro di misura è stato danneggiato o sporcato.
- Potrebbe non essere possibile eseguire misurazioni se c'è un'elevata quantità di shock sull'unità di misura.
- La vita dell'unità di misura lungo lo Stand dovrebbe essere allentata a seconda dei cambiamenti ambientali e della durata dell'utilizzo. Usare la vite di regolazione della pressione nel retro dell'unità di misura per regolare la pressione adeguatamente.
- Usare batterie costruite dallo stesso produttore.
- Non appoggiarsi allo Stand o applicare forti urti ad esso.
- Durante l'immagazzinamento di BSM170/170B, rimuovere le batterie e reimballare.

II. Misura dell'altezza

A. Cautele nella misura

Attenzione/Cautela

- Se il dispositivo non è stabile o è sbilanciato quando si sale sulla pedana, usare le viti di regolazione della pedana per assicurarsi che il dispositivo sia livellato durante la misura.
- Prestare attenzione quando si abbassa l'unità di misura per non colpirsi le dita.
- Non correre intorno o giocare intorno alla pedana. Potrebbe causare gravi ferite.
- Bambini e persone con mobilità limitata dovrebbero essere supervisionate o assistite durante l'acquisizione della misura con il BSM170/170B.

B. Istruzioni Misura

1. Muovere l'unità di misura fino che un numero appare sullo schermo.



2. Salire sulla pedana a piedi nudi e abbassare l'unità di misura così che la parte superiore dell'unità di misura tocchi la testa dell'esaminato. La misura dell'altezza è mostrata sullo schermo LCD come mostrato sotto.




* Se il mantenimento del valore di misura è stato abilitato nelle impostazioni con  dopo che il valore di misura desiderato è mostrato sullo schermo LCD, rimarrà bloccato per il tempo impostato.

* Solo il BSM170B può connettersi a InBody via grazie al Bluetooth. Fare riferimento al manuale d'uso dell'InBody riguardo alla connessione Bluetooth. Se il BSM170B è connesso all'InBody, premendo il tasto  apparirà il messaggio 'send' sullo schermo LCD, come illustrato sotto, e la misura sarà trasmessa all'InBody.




<Non connesso ad InBody>

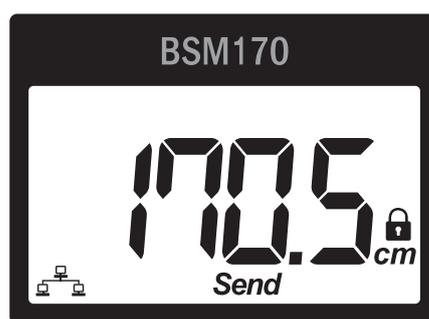

<Connesso ad InBody>

C. Postura corretta


L'esaminato deve mantenere la corretta postura per avere risultati accurati della misura.

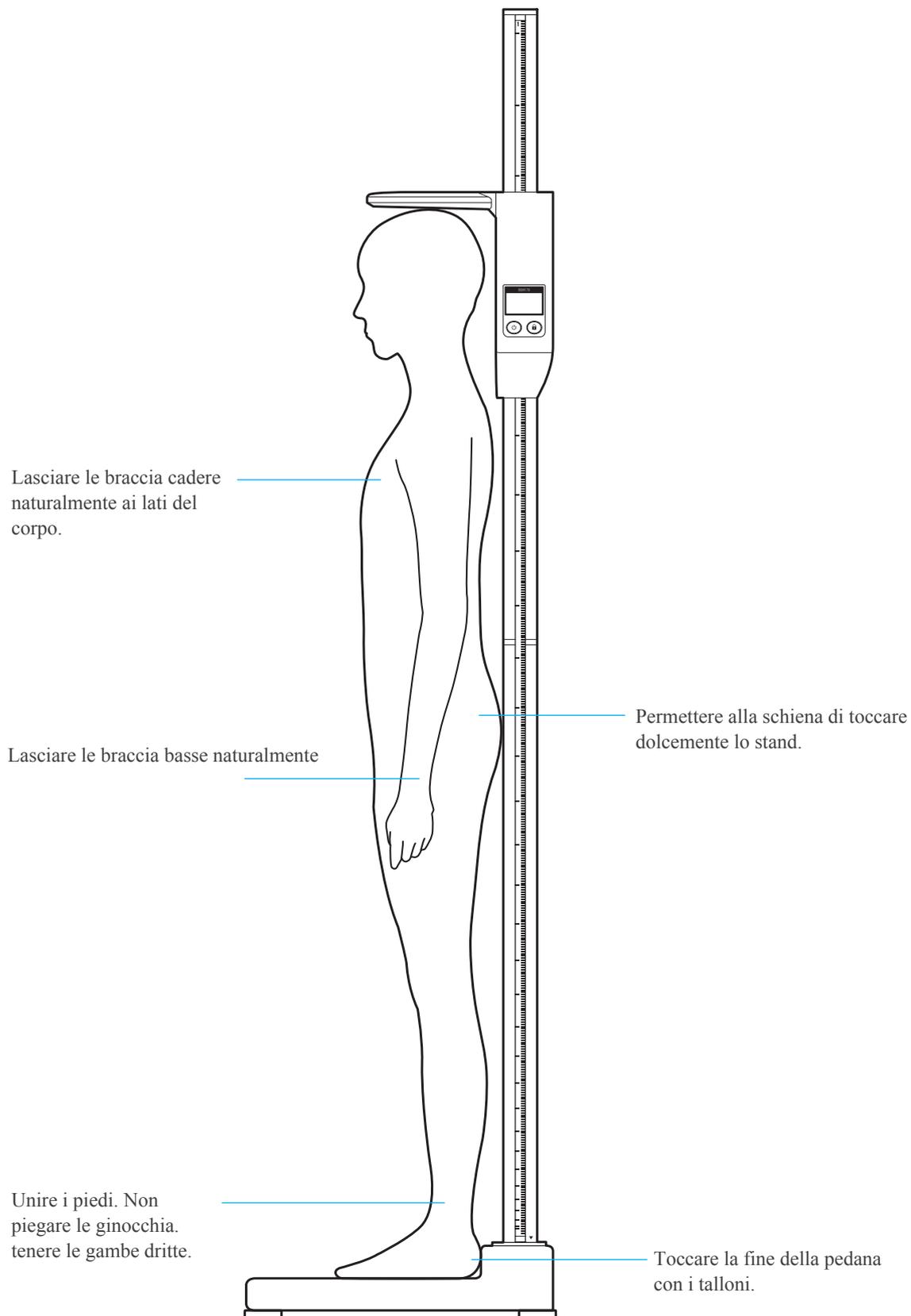


III. Trasporto ed stoccaggio

A. Istruzioni reimballaggio

1. Preparare la scatola di imballaggio del BSM170/170B.

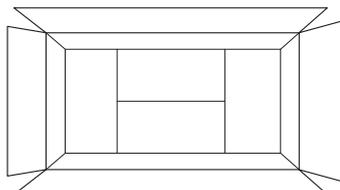


2. Posizionare i blocchi di imballaggio nella parte inferiore e 2 piccoli blocchi di polietilene ad entrambi i lati della scatola di imballaggio come illustrato di seguito.

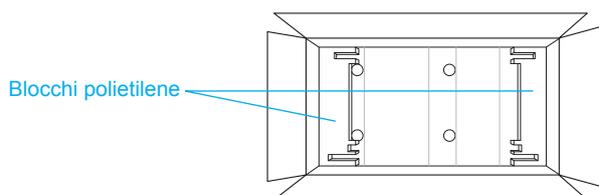


3. Posizionare le componenti disassemblate come illustrato di seguito.


*Scatola accessori: nastro di misura 1EA, viti montaggio pedana 4EA, viti montaggio Stand 4EA, batterie AA 4EA.

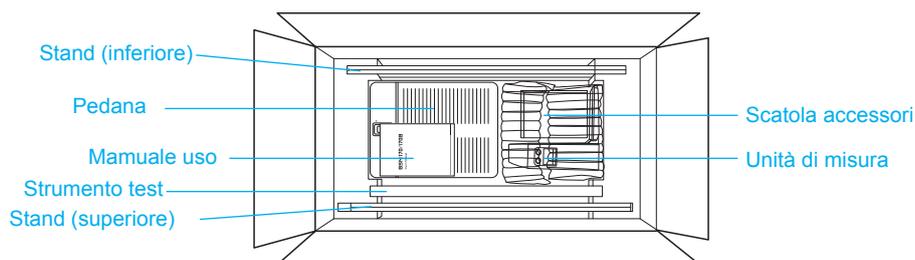

4. Posizionare 1 blocco grande di polietilene sopra la pedana.

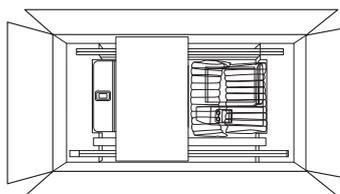

5. Chiudere la scatola di imballaggio e sigillarla con del nastro.

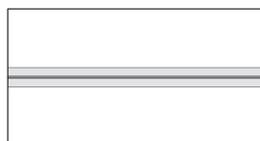


B. Trasporto e ambiente di conservazione

Il BSM170/170B dovrebbe essere trasportato o immagazzinato alle seguenti condizioni:

Intervallo temperatura	-10 ~ 70°C
Umidità relativa	10 ~ 80% RH (Senza condensa)
Pressioen atmosferica	50 ~ 106kPa

IV. FAQ

Anche se nessun problema dovesse presentarsi con l'apparecchiatura, gli utenti potrebbero comunque avere molte domande, specialmente riguardanti le procedure cliniche. Alcune domande e risposte comuni sono elencate sotto. Se si riscontrano problemi durante l'utilizzo di BSM170/170B o si hanno domande riguardanti la misurazione dell'altezza, fare riferimento alle soluzioni di seguito altrimenti si prega di contattare InBody.

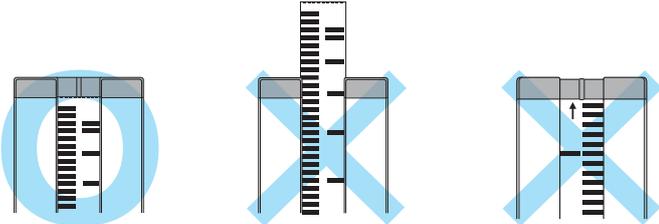Domande	Risposte
<ul style="list-style-type: none">• Il BSM170/170B non si accende	<ul style="list-style-type: none">• Le batterie potrebbero essere scariche e dover essere sostituite.<ul style="list-style-type: none">* Se l'icona batteria () appare sullo schermo, cambiare le batterie il prima possibile.
<ul style="list-style-type: none">• La misura dell'altezza sembra essere non accurata	<ul style="list-style-type: none">• Verificare il livellamento del BSM170/170B .• Riavviare il BSM170.• Il nastro di misura potrebbe essere sporco. Pulire il nastro di misura con un panno soffice. Non utilizzare soluzioni per pulire perchè potrebbero danneggiare il nastro di misura.• Verificare se il nastro di misura fuoriesce oltre la parte superiore dello Stand. Il nastro dovrebbe essere completamente inserito nell'estremità.• La freccia di riferimento sul nastro di misura deve essere rivolta in basso così che, una volta assemblato, la scala più fine è visibile sul lato sinistro. <div style="text-align: center;"></div> <ul style="list-style-type: none">• La corretta postura deve essere mantenuta durante la misura. Per dettagli sulla postura, guardare 'C. Postura corretta' sotto 'II. Misurazione altezza' nel manuale d'uso.
<ul style="list-style-type: none">• Lo stand non è sicuro o stabile.	<ul style="list-style-type: none">• Verificare che la parte inferiore e le viti di fissaggio comuni siano fissate saldamente
<ul style="list-style-type: none">• L'unità di misura è difficile da abbassare.	<ul style="list-style-type: none">• Girare la vite di regolazione sulla parte posteriore dell'unità di misura a sinistra o destra per regolare e garantire un miglior scorrimento dell'unità di misura.<ul style="list-style-type: none">* Di default, elevata pressione è applicata per evitare che la unità di misura scorra liberamente. se la pressione è debole e la base comincia a scendere, avvitarla in senso orario per aumentare la pressione.* Se la vite è avvitata troppo saldamente, l'unità di misura potrebbe non muoversi.
<ul style="list-style-type: none">• L'unità di misura è mossa ma il valore sullo schermo LCD non cambia.	<ul style="list-style-type: none">• 'Auto-blocco' potrebbe essere abilitato. Guardare 'D. Impostazioni Statimetro' sotto 'I. Installazione Statimetro' di questo manuale d'uso per regolare l' 'Auto-blocco'.
<ul style="list-style-type: none">• Un messaggio di errore compare sullo schermo LCD.	<ul style="list-style-type: none">• L'unità di misura è stata mossa troppo velocemente. Il BSM170/170B entra anche in modalità di standby se l'unità di misura è inattiva per più di 2 secondi.

V. Altro

* Il BSM170/170B è registrato per la compatibilità elettromagnetica in accordo con il Framework Act on Telecommunications and the Radio Waves Act.

* Il BSM170/170B è disegnato, prodotto, e ispezionato dal sistema di controllo qualità di InBody. InBody segue la ISO9001, per i sistemi di gestione della qualità internazionale.


A. Aspetto e funzioni

I seguenti sono i nomi e le funzioni di ciascuna parte del BSM170/170B.

* Verificare ciascun componente del BSM170/170B per presenza di eventuali danni prima dell'installazione.


1. Unità di misura

- ❶ Schermo LCD: Mostra i valori di misurazione dell'altezza, e lo stato di connessione del dispositivo.
- ❷ Tasto On/Off: Usato per accendere/spengere il dispositivo.
- ❸ Tasto blocco: Usato per bloccare l'altezza misurata sull'unità di misura. Permette di muovere l'unità di misura senza variare il valore mostrato sullo schermo LCD.
- ❹ Regolazione pressione: Usato per regolare la facilità di scorrimento dell'unità di misura.
- ❺ Vano batterie: Inserire le batterie AA qui.

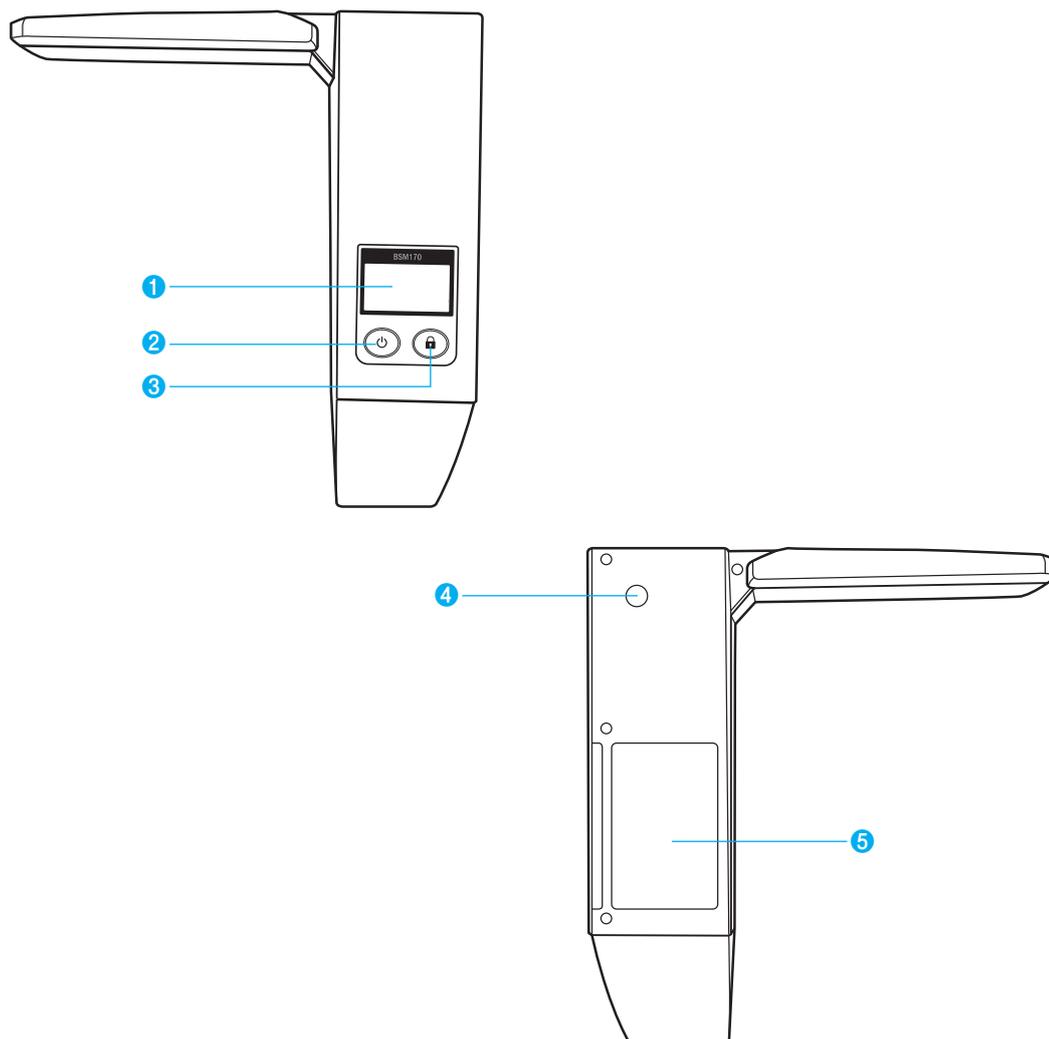


2. Parte superiore

- ❶ Stand (superiore): Parte superiore dello Stand.
- ❷ Nastro di misura: Usato per una corretta misurazione dell'altezza.
- ❸ Stand (inferiore): Parte inferiore dello Stand.

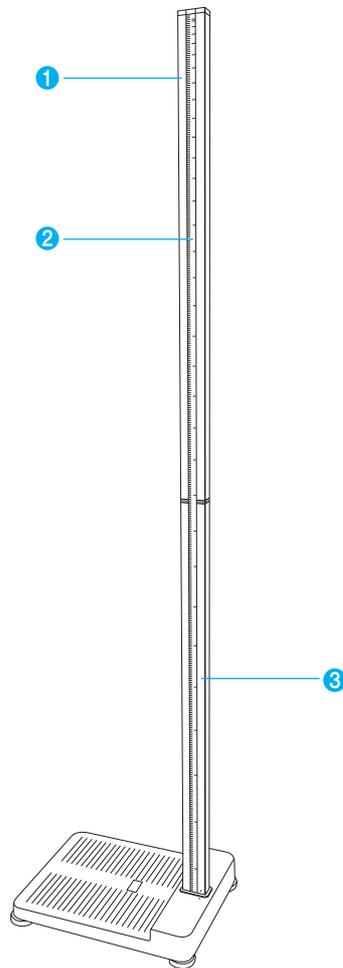

3. Parte inferiore

- ❶ Foro inserimento Stand: lo stand è inserito qui per l'assemblaggio con la pedana
- ❷ Pedana: L'esaminato sale sulla pedana per la misurazione dell'altezza.
- ❸ Viti livellamento: Usate per regolare la pedana livellandola per una misura corretta dell'altezza.

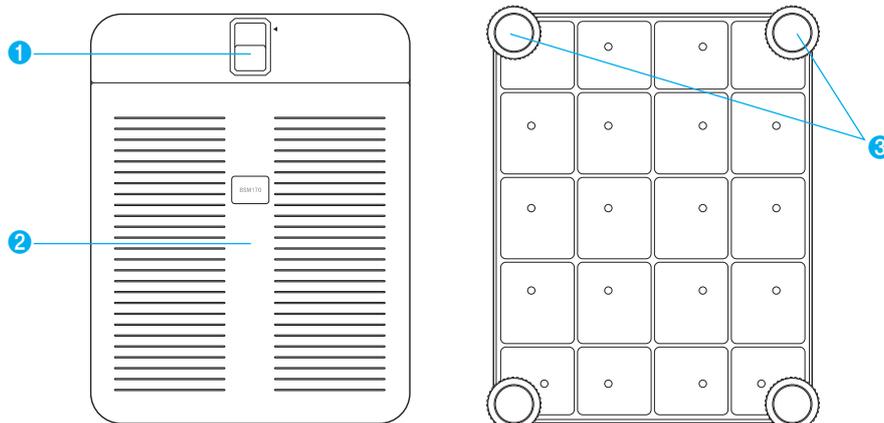

B. Simboli

Simboli di Sicurezza



Attenzione/Cautela

Altri simboli



Produttore



Corrente diretta



Conformità europea



Numero di serie



Rappresentante autorizzato nella
COMUNITA' EUROPEA



Smaltimento di vecchi dispositivi elettrici & elettronici

(Da applicare nell'Unione Europea e in altri paesi Europei con sistemi di raccolta differenziata). Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere trattato come un normale rifiuto. Deve, invece, essere portato in un punto di raccolta rifiuti per il riciclo di dispositivi elettrici & elettronici. Assicurandoti che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterai a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti essere causate dalla gestione inappropriata di questo rifiuto. Per maggiori e più dettagliate informazioni riguardo al riciclo di tale prodotto, fare riferimento alle ordinanze locali e ai piani di riciclo.



Questo dispositivo è conforme con la sezione 15 del FCC Rules. L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non dovrebbe causare interferenze dannose, e (2) questo dispositivo deve accettare qualunque interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare operazioni indesiderate.

ATTENZIONE

Questo dispositivo potrebbe generare o usare energia a radio frequenza. Cambi o modifiche al dispositivo potrebbero causare interferenze dannose a meno che le modifiche siano espressamente approvate nel manuale di istruzioni. L'utilizzatore potrebbe perdere l'autorità di utilizzare questo dispositivo se applicasse una modifica non autorizzata.

Note

Questo dispositivo è stato testato e trovato conforme con i limiti per la Classe B dei dispositivi digitali, seguendo la sezione 15 del FCC Rules. Questi limiti sono stati disegnati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in una installazione domiciliare. Questo dispositivo genera, usa, e può irradiare energia a radio frequenza e, se non installato ed usato in accordo con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Comunque, non ci sono garanzie che l'interferenza non avvenga in particolari installazioni. Se questo dispositivo causasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che potrebbero essere determinate dall'accensione o spegnimento del dispositivo, l'utilizzatore è invitato a provare a correggere le interferenze seguendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo ed il ricevitore.
- Connettere il dispositivo ad una presa con un circuito differente da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il fornitore o un tecnico esperto di radio/TV per eventuale aiuto.

C. Specifiche

Uso	Statimetro meccanico manuale
Elementi misurati	Altezza
Altezza misurata	350 ~ 2100mm (1 ft. 1.78 in. ~ 6 ft. 10.67 in.)
Intervallo di errore nella misura	± 1mm (± 0.04 in.)
Schermo risultati	Schermo LCD personalizzato
Misura dell'altezza	Misura manuale
Unità di misura	Selezionare tra 'cm' e 'inch'
Alimentazione	DC 6V (4 AA- 1.5V batterie)
Interfaccia esterno	Bluetooth *Solo per BSM170B
Dimensioni	15.35 (W) × 19.70 (L) × 86.23(H): inch 390 (W) × 500.6 (L) × 2190.4 (H): mm
Peso dispositivo	8.5kg
Ambiente operativo	10 ~ 40°C(50 ~ 104°F), 30 ~ 75% RH, 70 ~ 106kPa
Ambiente stoccaggio	-10 ~ 70°C (4 ~ 158°F), 10 ~ 80% RH, 50 ~ 106kPa (Senza condensa)

* Le specifiche potrebbero cambiare senza preavviso.

