

Trasferire il database pazienti da InBody a Lookin'Body120

Modelli InBody270, InBody370S, InBody570 e InBody770

- 1) Accedere al menu Amministratore di InBody (pw di default 0000)
- 2) Inserire una memoria USB (4GB, FAT type) nella porta USB HOST dell'InBody
- 3) Selezionare l'opzione "07. Esportare i dati in Excel"




InBody270



InBody370S - InBody570 - InBody770

- 4a) Premere il tasto "Esporta Tutti" per esportare tutti i dati presenti nel database
oppure
 - 4b) Premere il tasto "Seleziona", selezionare i dati che si intende esportare e premere il tasto "Fatto"
 - 5) Premere il tasto "Avvio"
Attendere il completamento dell'esportazione
 - 6) Al termine dell'operazione viene riprodotto un suono
 - 7) Uscire dal menu Amministratore di InBody
- N.B. l'archivio dei dati è memorizzato nella cartella "inbody\lookinbody" della memoria USB
- 8) Rimuovere la memoria USB dall'InBody ed inserirla in una porta USB del PC
 - 9) Avviare il software Lookin'Body120

10) Accedere al menu "Impostazioni"

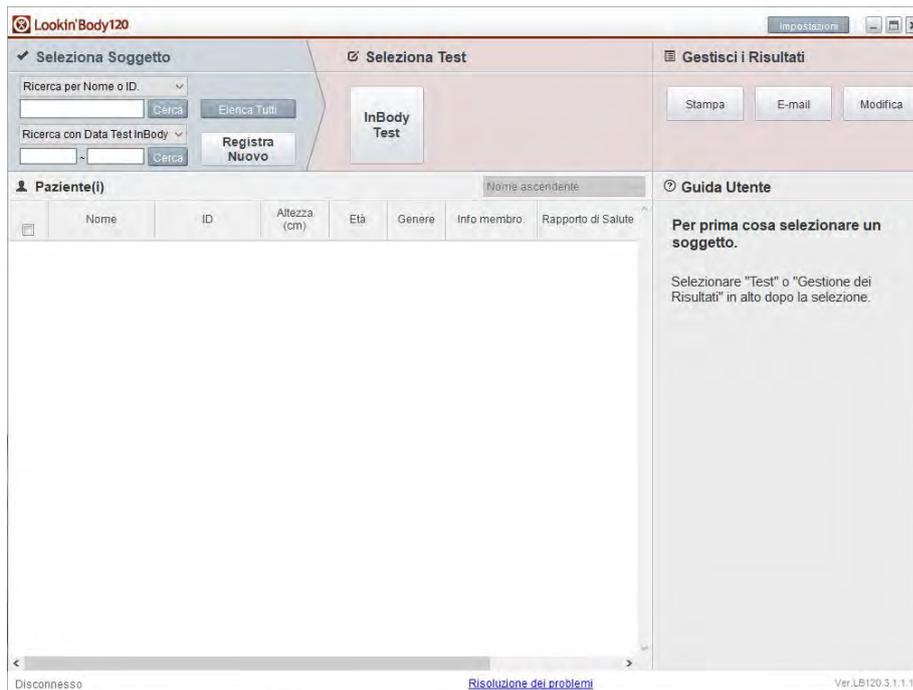

11) Selezionare l'opzione "08. Importazione dei Dati"



12) Premere il tasto "Importazione dei Dati"



13) Selezionare la cartella "inbody\lookinbody" della memoria USB e premere il tasto "OK"



Attendere il completamento dell'importazione

N.B. i dati importati sono identificati con l'ID del paziente memorizzato su InBody

14) Ritornare al menu principale del programma

Modello InBody370

- 1) Inserire una memoria USB (4GB, FAT type) nella porta USB HOST dell'InBody
- 2) Premere il tasto "Data" dell'InBody



- 3) Selezionare i dati che si desidera esportare e premere il tasto "Copia"




Attendere il completamento dell'esportazione

- 4) Al termine dell'operazione viene riprodotto un suono
- 5) Uscire dal menu Amministratore di InBody

N.B. l'archivio dei dati è memorizzato nella cartella "**inbody\lookinbody**" della memoria USB

- 6) Rimuovere la memoria USB dall'InBody ed inserirla in una porta USB del PC
- 7) Avviare il software Lookin'Body120

8) Accedere al menu "Impostazioni"

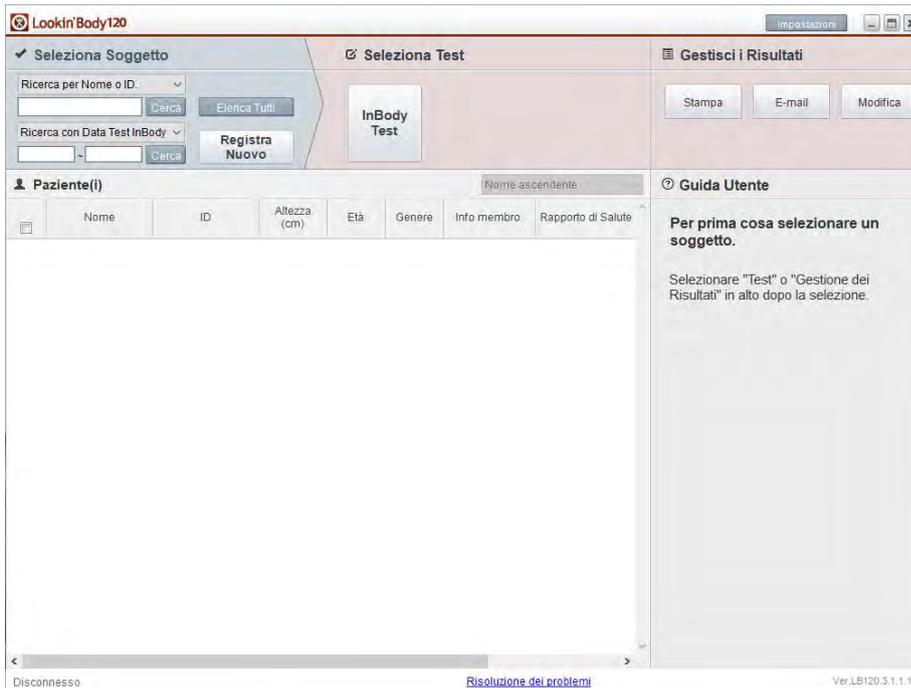

9) Selezionare l'opzione "08. Importazione dei Dati"



10) Premere il tasto "Importazione dei Dati"



- 11) Selezionare la cartella **"inbody\lookinbody"** della memoria USB e premere il tasto **"OK"**




Attendere il completamento dell'importazione

N.B. i dati importati sono identificati con l'ID del paziente memorizzato su InBody

- 12) Ritornare al menu principale del programma

Modello InBodyS10

- 1) Inserire una memoria USB (4GB, FAT type) nella porta USB HOST dell'InBody
- 2) Premere il tasto "DB" dell'InBody

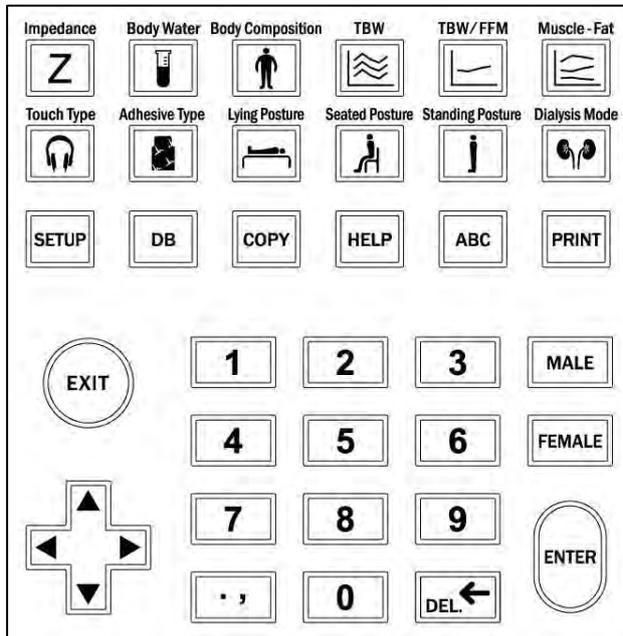

- 3) Selezionare i dati che si desidera esportare e premere il tasto "Copia"




Attendere il completamento dell'esportazione

- 4) Al termine dell'operazione viene riprodotto un suono
- 5) Uscire dal menu Amministratore di InBody

N.B. l'archivio dei dati è memorizzato nella cartella "**inbody\lookinbody**" della memoria USB

- 6) Rimuovere la memoria USB dall'InBody ed inserirla in una porta USB del PC
- 7) Avviare il software Lookin'Body120

8) Accedere al menu "Impostazioni"

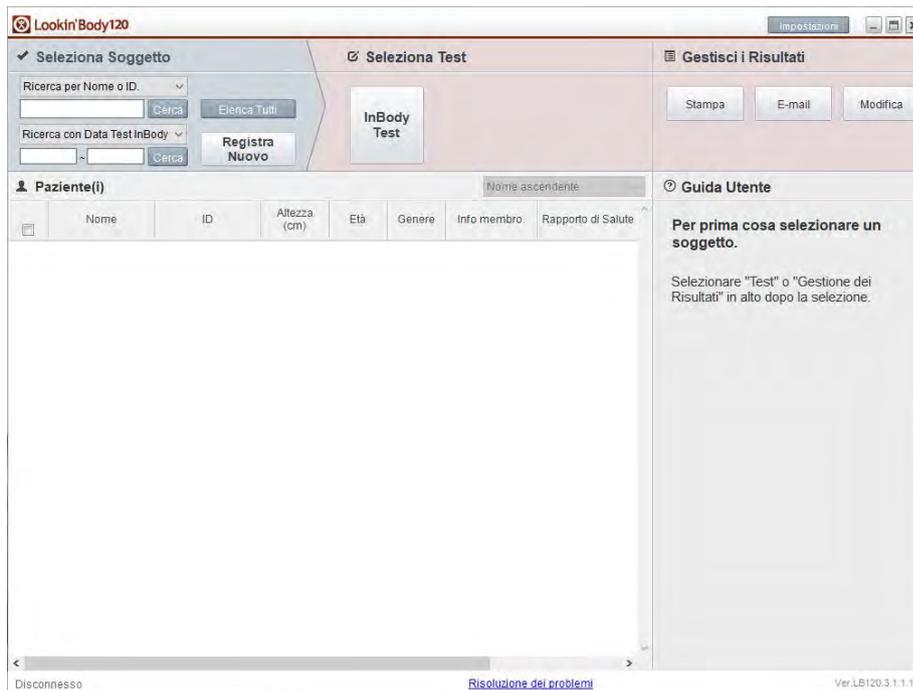


9) Selezionare l'opzione "08. Importazione dei Dati"



10) Premere il tasto "Importazione dei Dati"



- 11) Selezionare la cartella **"inbody\lookinbody"** della memoria USB e premere il tasto **"OK"**

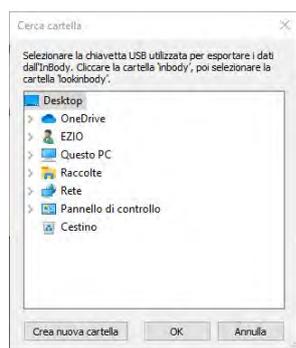

Attendere il completamento dell'importazione

N.B. i dati importati sono identificati con l'ID del paziente memorizzato su InBody

- 12) Ritornare al menu principale del programma