

## Caratteristiche di Compatibilità delle Pen Drive USB per InBody

In funzione della data di fabbricazione e della versione del firmware installato sull'InBody, non tutte le pen drive USB vengono riconosciute correttamente dai sistemi.

Per questo motivo è raccomandato l'utilizzo di pen drive USB (San Disk) fornite direttamente da InBody.



In caso contrario potrebbe verificarsi che l'aggiornamento firmware, l'esportazione del database pazienti, il caricamento del logo, etc. non siano portati a termine completamente e/o correttamente.

### Matrice di Compatibilità Modello InBody – Pen Drive USB

Modello	512MB	1GB	2GB	4GB
Inbody770 Inbody570 Inbody370S Inbody370 Inbody270 InbodyS10 InbodyJ30	Compatibile	Compatibile	Compatibile	Compatibile
Inbody720	Compatibile	Compatibile	Compatibile	
InbodyJ10	Compatibile	Compatibile	Compatibile	
Inbody230	Compatibile			

### Formattazione delle pen drive USB

Le pen drive USB devono essere formattate utilizzando i seguenti standard:

- InBody770/570/370S/370/270/S10/720/J10/J30: FAT32
- InBody230: FAT