


Come esportare il QC Report su USB memory stick

InBody120


Per il modello InBody120 non è possibile esportare il QC Report su USB memory stick.

Modelli InBody270, InBody370S, InBody570 e InBody770

- 1) Accedere al menu Amministratore di InBody (pw di default 0000)
- 2) Inserire una memoria USB (4GB, FAT type) nella porta USB HOST dell'InBody
- 3) Dalla pagina 1 del menu Amministratore premere almeno 10 volte sul display touch screen, nella zona indicata dal cerchio rosso in figura
Verificare la zona corrispondente al proprio modello

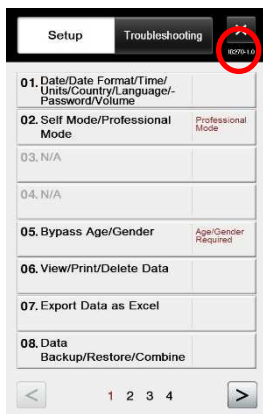

InBody270

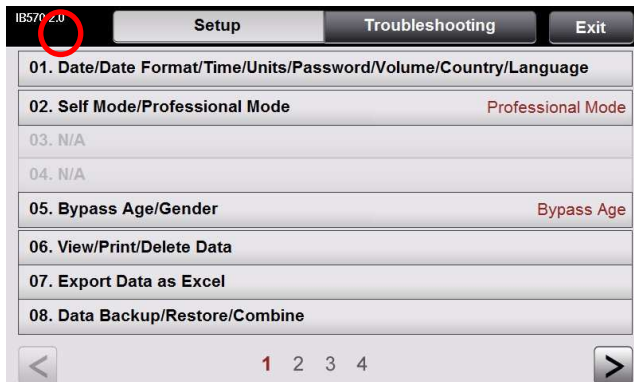

InBody370S - InBody570 - InBody770

Attendere il completamento dell'esportazione

- 6) Al termine dell'operazione, se andata a buon fine, viene riprodotto un suono
- 7) Uscire dal menu Amministratore di InBody