


## Come esportare il QC Report su USB memory stick

### Modello InBody120


*Per il modello InBody120 non è possibile esportare il QC Report su USB memory stick.*

### Modelli InBody270, InBody370S, InBody570 e InBody770

- 1) Accedere al menu Amministratore di InBody (pw di default 0000)
- 2) Inserire una memoria USB (4GB, FAT type) nella porta USB HOST dell'InBody
- 3) Dalla pagina 1 del menu Amministratore premere almeno 10 volte sul display touch screen, nella zona indicata dal cerchio rosso in figura  
Verificare la zona corrispondente al proprio modello

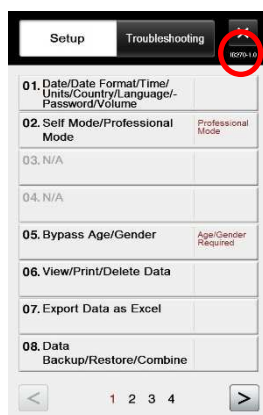

**InBody270**

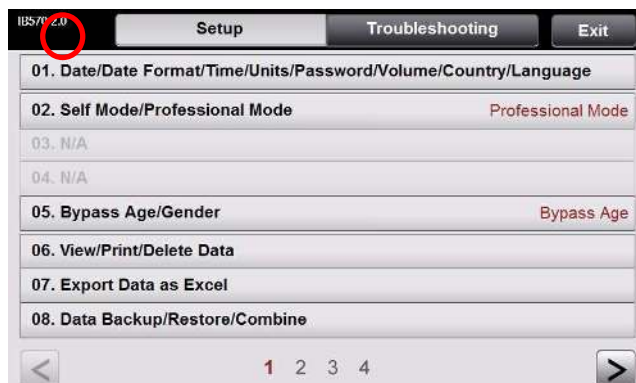


**InBody370S - InBody570 - InBody770**

*Attendere il completamento dell'esportazione*

- 6) Al termine dell'operazione, se andata a buon fine, viene riprodotto un suono
- 7) Uscire dal menu Amministratore di InBody

## Modelli InBodyS10, InBody370

- 1) Accedere al menu Amministratore di InBody (pw di default 0000)
- 2) Inserire una memoria USB (4GB, FAT type) nella porta USB HOST dell'InBody
- 3) Dal menu Amministratore premere 10 volte sul display touch screen, nella zona indicata dal cerchio rosso in figura

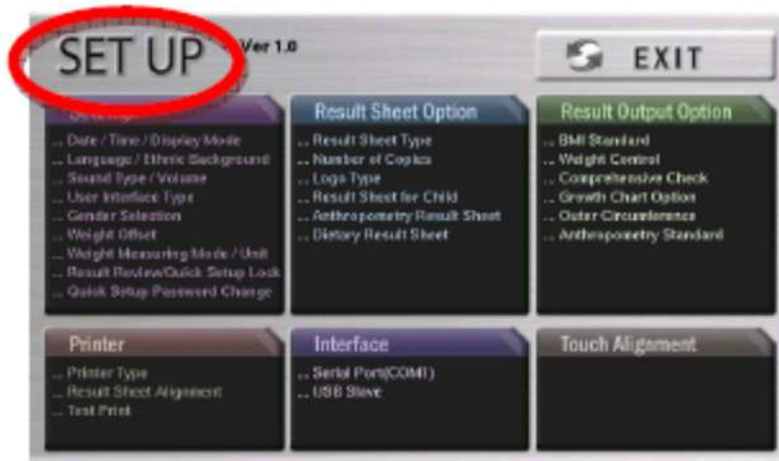

*Attendere il completamento dell'esportazione*

- 6) Al termine dell'operazione, se andata a buon fine, viene riprodotto un suono
- 7) Uscire dal menu Amministratore di InBody