


Installazione del programma Lookin'Body 120 MAC

Per avviare l'installazione del programma procedere come descritto nel seguito.

- 1) Copiare sul Desktop (Scrivania) del MAC il file di installazione: "LB120MacSetup_Ver.2.0.0.1.dmg" o successive.
- 2) Cliccare due volte sul file per avviarlo; verrà mostrata la finestra per eseguire l'installazione.




- 3) Trascinare (Drag and Drop) l'icona del programma sopra l'icona delle Applicazioni (Applications).
- 4) Al termine, il programma viene mostrato nell'elenco delle Applicazioni e può essere anche copiato nel Dock.

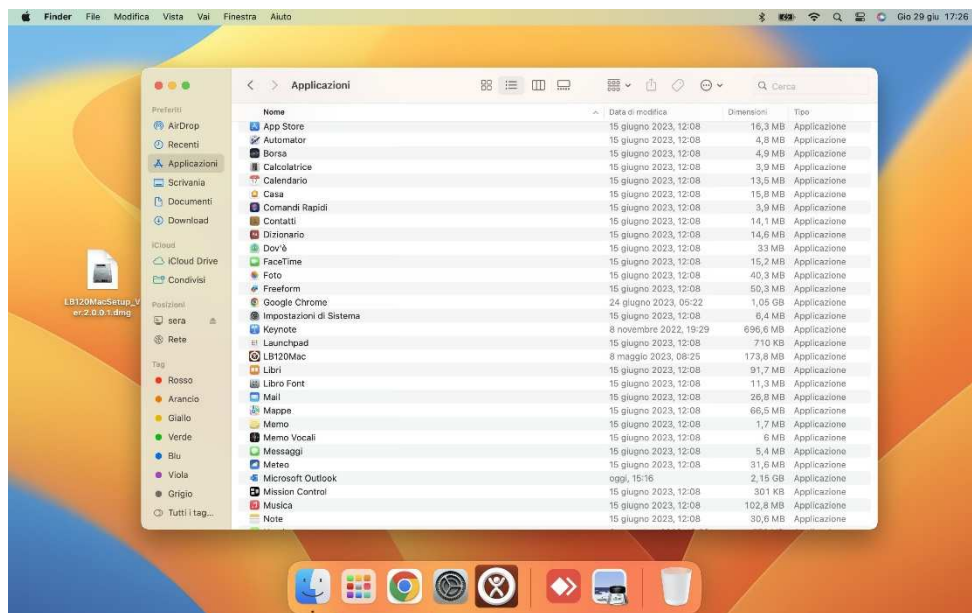

Avvio del programma Lookin'Body 120 MAC

Al primo avvio del programma, viene visualizzato dal Sistema Operativo un messaggio di allerta relativo alla impossibilità di verificare la presenza di malware.

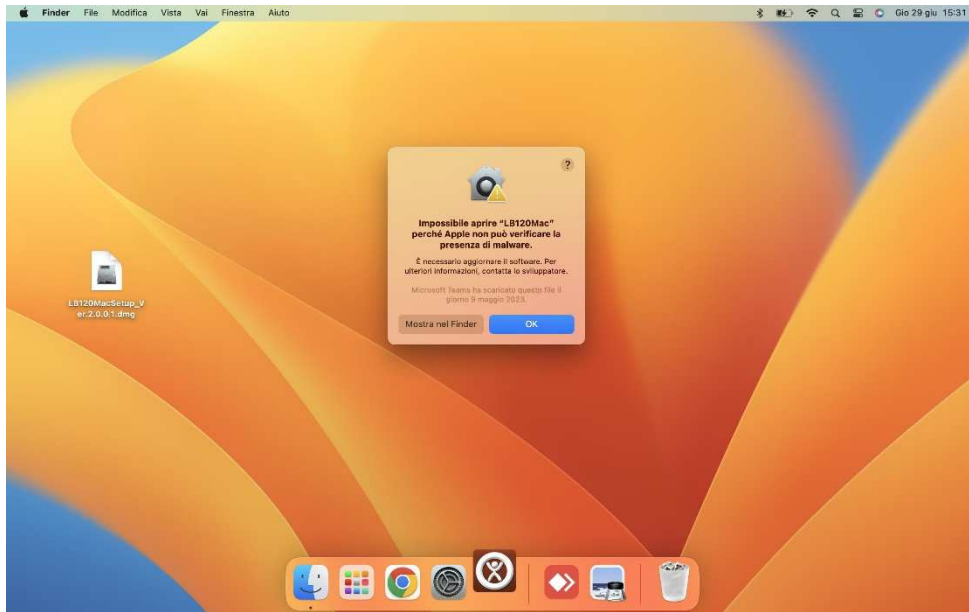


N.B. il testo del messaggio dipende dalla versione MAC OS installata.


Questo succede con tutte le App NON scaricate dall'App Store di Apple.

Per procedere con l'avvio del programma procedere come descritto nel seguito.


- 1) Cliccare sul tasto **"Mostra nel Finder"**.
- 2) Dalla finestra del Finder, selezionare il programma **LB120Mac** e cliccare contemporaneamente con 2 dita sul touchpad.

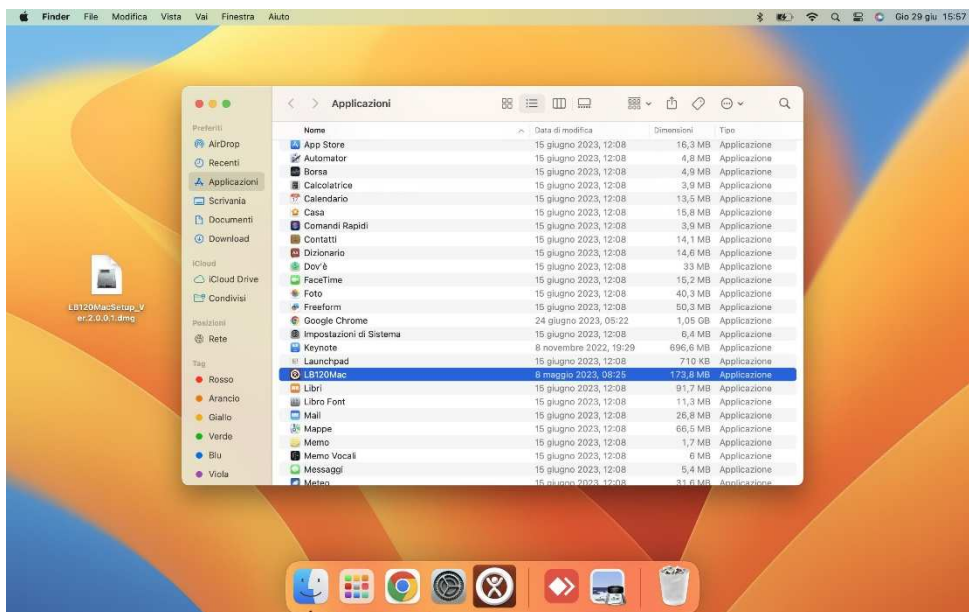

3) Dal menu a tendina visualizzato, cliccare su **"Apri"**.

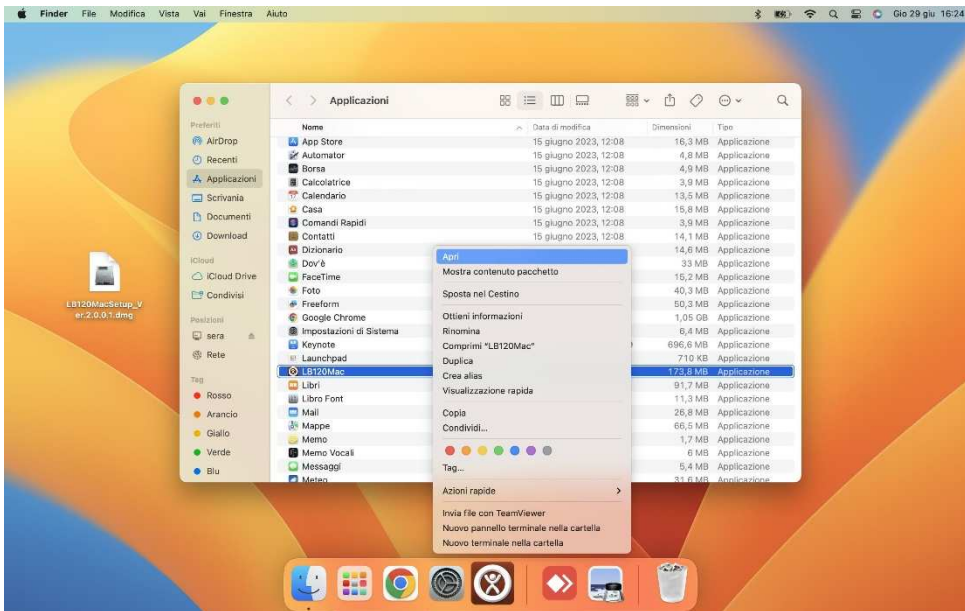

4) Dalla successiva finestra che viene visualizzata, cliccare nuovamente su **"Apri"**.

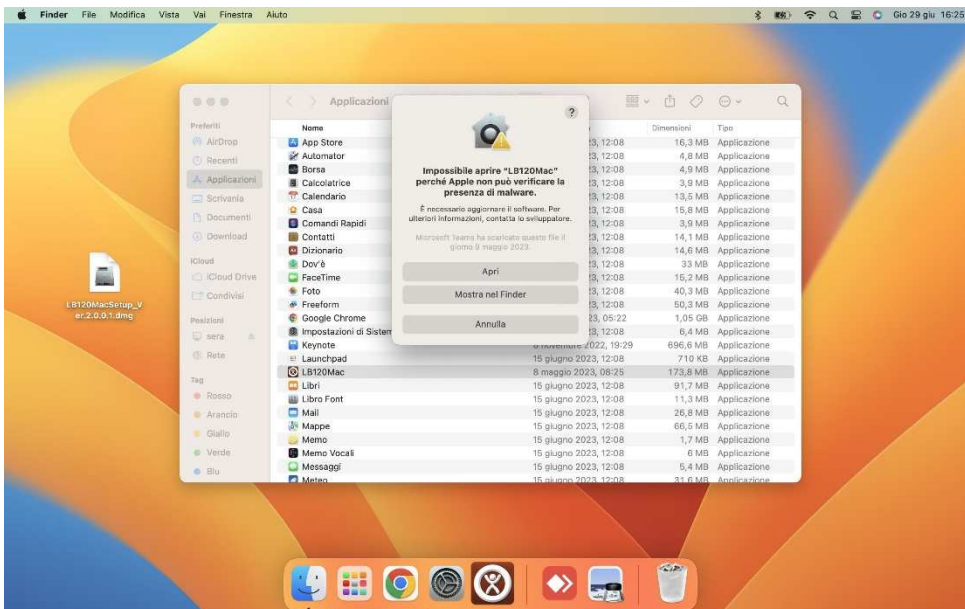

5) Al termine, verrà visualizzata la finestra principale del programma.

